

Cirrus Plus EC

SILLA ELÉCTRICA



MANUAL DEL USUARIO E INSTRUCCIONES

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

Port Washington, NY 11050

Toll Free: 877-224-0946 • 516-998-4600

Website: www.drivemedical.com

Tapicería del respaldo

Descansabrazo

Controlador

Baterías

**Juego de
ruedas
traseras**

Reposapiés

Armazón

Ruedecilla con eje giratorio



ANTES DE TRATAR DE MANIOBRAR POR UNA RAMPA DEBE DE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

1. Superficie de la rampa: ¿Está muy resbalosa?
2. Inclinación de la rampa: ¿La inclinación de la rampa es muy pronunciada para tratar de subirla solo?
3. Longitud de la rampa: ¿Es muy larga para su resistencia?
4. Obstáculos: ¿Existe cualquier tipo de obstáculo sobre la rampa que requiera de la ayuda de alguien más?

AL SUBIR O BAJAR RAMPAS SIEMPRE SE RECOMIENDA QUE CUENTE CON AYUDA.

A manera de evitar la pérdida de control de la dirección o la posibilidad de voltearse e irse hacia atrás, se recomienda que cuente con un asistente cuando suba pendientes mayores a 6°.

Si es necesario detenerse cuando esté subiendo una pendiente, debe tener cuidado especial para evitar movimientos abruptos o repentinos cuando resuma el funcionamiento de la silla para evitar que la silla se voltee hacia atrás.

Mantenga la silla bajo control en todo momento al bajar una rampa o una pendiente. Debe de controlar la velocidad en todo momento.

Cuando está operando su Silla Cirrus Plus EC y se aproxima a un obstáculo, tenga cuidado para evitar que la silla se vuelva inestable.

DESEMPACANDO Y ARMANDO LA UNIDAD

DESEMPACANDO LA UNIDAD

Después de sacar la silla eléctrica Cirrus Plus EC de la caja, revise que se incluyen las siguientes partes principales como especificación estándar.

1. El armazón principal con motores/engranajes y las ruedas delanteras ensambladas
2. El montaje frontal con los estribos giratorios (Fig. 1)
3. Ruedas impulsoras traseras (Fig. 2)
4. Rueda anti-vuelco (Fig. 3)
5. 2 baterías (batería recargable sellada de ácido-plomo) U1 35 Amp (en cajas separadas)
6. Charola de la batería (Fig. 4)
7. Cargador de la batería de 4 amperes
8. Controlador P.G. VSI SO (Fig. 15)
9. Motores: 24 VCD (Fig. 2)

MONTAJE

Arme las partes principales mencionadas de acuerdo al siguiente procedimiento y revise el montaje para tener un funcionamiento normal.

1. Coloque los estribos giratorios.
2. Las ruedas impulsoras, el montaje del motor/engranajes y de las ruedas anti-vuelco están preinstaladas.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

DESPUÉS DE SEGUIR LOS PASOS EN EL FUNCIONAMIENTO GENERAL, SIGA CON LO SIGUIENTE.

Cuenta con dos baterías. Conecte el cableado interno a cada batería asegurándose de colocarlo de acuerdo a su polaridad correspondiente.

El cable rojo se conecta con el polo positivo (también es de color rojo). El cable negro se conecta con el polo negativo (también es de color negro). Conecte los cables de energía (ubicados en la parte frontal derecha) a las conexiones correspondientes y asegúrese de que los cables de energía estén libres de obstáculos al reemplazar la tapa de la caja de la batería. Apriete la correa aseguradora de la caja de la batería. (Fig. 15)

Coloque las baterías dentro de las cajas de la batería. Introduzca la caja de la batería con el cable de conexión externo apuntando hacia el frente de la silla.

1. Deslice el módulo de control de energía dentro del soporte de montaje ubicado debajo del descansabrazos y asegúrelo en su posición. Su módulo de control puede montarse en el lado izquierdo o derecho de la silla.

2.

3. Asegúrese que todas las conexiones están conectadas correctamente.



Fig. 4 Paso 1

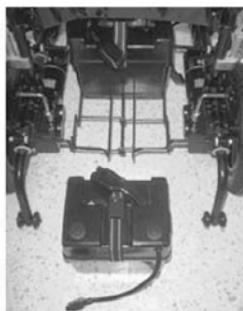


Fig. 5 Paso 2

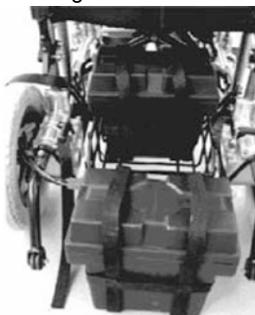


Fig. 5 Paso 3

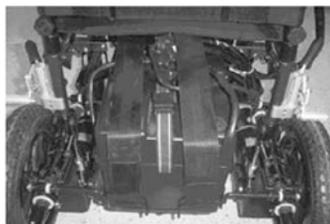


Fig. 6. Paso 4

OPERACIÓN GENERAL

1. Sujete los dos descansabrazos con sus manos.
2. Extienda los descansabrazos hacia afuera.
3. Presione hacia abajo sobre los rieles del asiento para asegurarse de que la silla se abra totalmente y se bloquee dentro de los receptores del armazón de la silla de ruedas.
4. Gire los estribos hacia el frente de la silla y asegúrese de que se bloqueen en su lugar.
5. Luego puede colocar la vara de rigidez opcional del armazón y colocarla en su lugar en los postes del asiento.

PARA DOBLAR LA SILLA PARA GUARDARLA O TRANSPORTARLA

1. Doble la base de los estribos y desbloquee las palancas, esto posiciona los estribos. Gire la base de los estribos y los estribos hacia afuera. Puede dejarlos en su posición (Fig. 8) o quitarlos completamente al levantar cada estribo verticalmente.
2. Quite de las baterías de la charola de la batería.
3. Sujete la parte del medio de la tapicería del asiento, con una mano en el frente y la otra mano atrás y jale la tapicería del asiento hacia arriba.



Fig. 8

PALANCAS DE RUEDA LIBRE

La Silla Cirrus Plus EC está equipada con dos palancas de rueda libre. (Fig. 10) Estas palancas le permiten desactivar los motores impulsores y maniobrar la silla manualmente.

¡ADVERTENCIA! ¡NO use su silla eléctrica mientras los motores impulsores están desactivados a menos que esté ante la presencia de un encargado! NO desactive los motores impulsores cuando la silla de ruedas esté sobre una pendiente. ¡La silla se puede deslizar hacia abajo por sí sola ocasionando una lesión!

Para activar o desactivar la opción de rueda libre:

1. Gire las palancas de rueda libre hacia afuera para desactivar los motores de impulsión.
2. Gire las palancas de rueda libre hacia adentro, para activar los motores de impulsión.

NOTA: Es importante recordar que cuando su Silla Cirrus Plus EC está en el módulo de rueda libre, el sistema de frenos está desactivado.

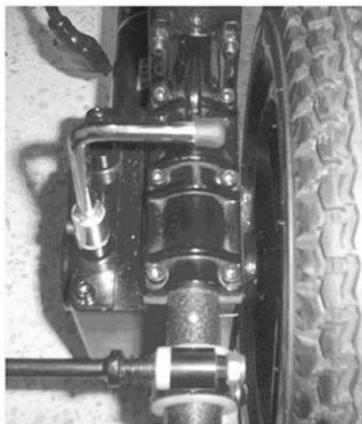


Fig. 10

DESCANSABRAZOS

El descansabrazos de altura ajustable (Fig. 11) viene como equipo estándar en su silla de ruedas. El ajuste para la silla de ruedas se facilita a través de una clavija de fijación que se introduce desde afuera del soporte del descansabrazos en la parte más baja y en la parte superior del poste del descansabrazos. Para activar la clavija de fijación simplemente jale la palanca que se encuentra a un lado del tubo de soporte y sáquela del hoyo.

La unidad de control puede ajustarse fácilmente a diferentes posiciones para cumplir con la demanda del usuario. Para ajustarlo, afloje la perilla y mueva el tubo de montaje a la posición deseada y luego apriete los tornillos. El descansabrazos puede desbloquearse

Botón



Fig. 11

¡ADVERTENCIA!

**REEMPLACE LA TELA DESGASTADA O USADA
INMEDIATAMENTE. NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN
UNA CAÍDA Y PUEDE OCASIONARLE LESIONES GRAVES.**

ASIENTO

Las sillas de ruedas Cirrus Plus EC cuentan con tapicería que puede tensionarse. Al recibir su silla no debe existir la necesidad de hacer ajustes en su silla nueva, pero con el tiempo la tapicería se puede estirar. Contacte a su distribuidor para hacer un ajuste.



Fig. 13

REPOSAPIÉS

Su silla Cirrus Plus EC cuenta con reposapiés giratorios y desmontables estándar y estribos con altura ajustable. Para ajustar la altura, retire los tornillos y tuercas (Fig. 14) de cada lado y deslice el tubo extensor y el estribo hacia arriba o abajo a la altura deseada.

¡ADVERTENCIA! Nunca levante la silla de ruedas por los estribos. Estas partes son desmontables y no soportarán todo el peso de esta silla. Levante esta silla SOLAMENTE de sus partes no desmontables sobre el armazón principal. Nunca utilice el reposapiés para abrir puertas.

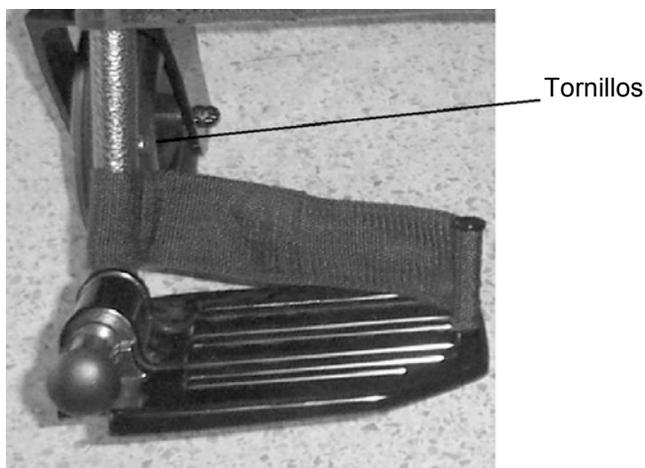


Fig. 14

MANEJANDO SU SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

ANTES DE SENTARSE EN SU SILLA CIRRUS PLUS ASEGÚRESE DE QUE:

1. La silla de ruedas eléctrica esté apagada.
2. Asegúrese que las palancas de la rueda libre están en la posición de "activada" (engaged).
3. El cargador de batería está desconectado

Después de transferirse a la silla asegúrese de que está colocado cómodamente y que se hayan ajustado los descansabrazos y reposapiés para ajustarse a sus necesidades. La posición de la palanca de control debe estar a su alcance para evitar la fatiga muscular al manejar.

PARA EMPEZAR:

1. Coloque el control de velocidad de la silla en SLOW (LENTO).
2. Oprima el interruptor "on/off" (encendido/apagado).
3. Empuje la palanca de control suavemente hacia la dirección a donde desea ir aplicando una presión estable y regular. Mientras más empuje la palanca de control más rápido se desplazará la silla. La silla se detendrá cuando la palanca de control regresa a la posición neutral o vertical.
4. El control direccional se alcanza al mover suavemente la palanca de control en la dirección en la que desea ir. Jale hacia atrás para ir en reversa.
5. El controlador puede programarse para adecuarse a todas las condiciones de manejo y sólo necesita un toque ligero para responder – Contacte a su distribuidor sobre la programación.

**EN CASO DE EMERGENCIA Y PARA DETENER LA SILLA
CIRRUS PLUS EC, SUELTE LA PALANCA DE CONTROL Y
SE DETENDRÁ.**

MANEJO SEGURO

Nunca maneje a una velocidad que supere su habilidad para controlar de manera segura su silla. Recuerde que las superficies mojadas o con material suelto necesitan mayor cuidado y control.

Apague siempre la silla y active los candados de las ruedas cuando se transfiera o mientras que la silla está parada por largos periodos de tiempo. Evite movimientos de paro/arranque bruscos ya que esto resultará en un consumo excesivo de la batería, aumentará el desgaste de las llantas y tendrá un desgaste rápido de la caja de engranes y los motores.

Mantenga su silla libre de arena y agua salada.

MANEJO ÁREAS INTERNAS / EXTERNAS

Cuando maneje en áreas internas mantenga el nivel mínimo de velocidad para evitar el riesgo de choque.

Cuando conduzca en áreas externas esté al pendiente de superficies mojadas, arena suelta, cunetas grandes y hoyos. Un poco de práctica le asegurará el entendimiento de la capacidad de su silla y le permitirá sobrepasar los obstáculos más comunes mientras opera su Silla Cirrus Plus EC.

Si va a operar su silla sobre caminos por favor revise las leyes obligatorias de transporte local relacionadas con los dispositivos de identificación y seguridad, como reflectores.

OPERACIÓN DE LA SILLA SOBRE SUPERFICIES QUE REQUIEREN DE CUIDADO ESPECIAL

Cuando suba o baje rampas se recomienda que el usuario:

1. Verifique visualmente para ver si el ángulo de la pendiente es menor de 6°.
2. Verifique para ver si la superficie de la rampa tiene suficiente AGARRE para evitar que se resbale.
3. Asegúrese de que la superficie de la rampa esté correctamente alineada con las llantas y que es lo suficientemente ancha para pasar libremente por la rampa.

Si la rampa cumple con estas condiciones, se recomienda que el usuario maneje la silla eléctrica lentamente hacia arriba o debajo de la rampa, asegurándose de que la silla se maneje en el centro de la rampa. De ser posible, pida que un ayudante vigile el progreso de la silla y evite que la silla se voltee al sujetar las agarraderas ubicadas en el respaldo.

Si la rampa no cumple con estas condiciones se recomienda que se encuentren otros métodos alternos para subir o bajar.

RESPUESTA DE LA SILLA

Si la silla no responde a su satisfacción, pídale al Distribuidor que ajuste la programación a un nivel en el que se sienta cómodo. Esta programación puede alterarse en cualquier momento para aumentar la velocidad de respuesta si mejora sus habilidades motoras o a velocidades más bajas a un nivel en el que se sienta cómodo y en control.

BORDES DE BANQUETAS

Se recomienda que antes de que el usuario intente subir o bajar los bordes de la cuneta, revise visualmente la altura de la cuneta para asegurarse de que no exceda una altura de 1 ½”.

Si la altura del borde de la banqueteta es menor a 1 ½”, el usuario debe aproximarse al borde de la banqueteta en el ángulo adecuado a la línea del borde a una velocidad lenta, subir o bajar el borde de la banqueteta lentamente para mantener la silla bajo control. Si va a subir el borde de una banqueteta puede que sea más fácil para el usuario subir la silla en reversa sobre el borde.

Si la altura del borde es mayor de 1 ½” no se recomienda que el usuario suba o baje el borde. Si tiene cualquier duda llame a alguien para que supervise la operación.

PENDIENTES PRONUNCIADAS

Cuando va a utilizar su silla eléctrica para subir y bajar pendientes, se recomienda que el usuario:

1. Verifique visualmente para ver si el ángulo de la pendiente es menor de 6°.
2. Verificar que la superficie de la pendiente esté áspera para evitar resbalones.
3. Los anti-vuelcos estén en su lugar.

Si la pendiente cumple con estas condiciones, se recomienda que el usuario se aproxime a la pendiente a baja velocidad, manteniendo la silla bajo control en todo momento. Tal vez sea preferible que se suba la pendiente en manera diagonal para disminuir la inclinación de la pendiente siempre que la superficie de la pendiente sea la suficientemente ancha y adecuada para evitar resbalones.

De ser posible, pida que un ayudante vigile el progreso de la silla y evite que la silla se voltee al sujetar las agarraderas ubicadas en el respaldo.

ADVERTENCIA: Si la pendiente no cumple con estas condiciones se recomienda que el usuario no suba o baje por la pendiente.

BATERIAS Y CARGADO

Cuando las baterías estén completamente cargadas debe tener suficiente energía para darle toda la movilidad requerida en un día – es importante que entienda cómo funcionan sus baterías y el cargador.

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si las baterías son del tipo de celda seca entonces no necesitan mantenimiento.

CARGANDO LAS BATERÍAS

1. Debe de cargar las baterías cuando el indicador de batería está sobre las barras de luz amarillas en un cuarto bien ventilado.
 2. NO coloque la silla eléctrica cerca de radiadores o chimeneas mientras la está cargando.
 3. NO fume o permita que existan llamas en el área inmediata.
 4. Apague el controlador de la silla antes de cargarla.
 5. Se recomienda que las baterías se carguen por un mínimo de 8 horas o durante toda la noche para asegurar que las baterías regresen a su capacidad de almacenaje. El cargador de batería es un dispositivo limitante de corriente y se apagará cuando las baterías estén cargadas completamente.
 6. Coloque la Silla Cirrus Plus EC a un lado de una toma de corriente de pared estándar.
 7. Conecte el cargador de batería a una toma de corriente de pared estándar y encienda el cargador.
 8. Coloque el botón del interruptor en la posición “On” (Encendido).
- Si la silla eléctrica está equipada con un controlador “unitario” (Fig. 15) (por ejemplo, uno que tiene una palanca de control en el controlador), entonces la toma para cargar la batería estará en la parte del frente del controlador.



Fig. 15

REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS

¡PRECAUCIÓN! - Si duda sobre su habilidad para levantar cualquier componente, se recomienda que busque ayuda para evitar una lesión.

1. Apague la unidad.
2. Desconecte los enchufes de conexión de la batería ubicados a un lado de la charola de la batería.
3. Libere el cinto que asegura la caja de la batería.
4. Desconecte los cables de conexión de la batería ubicados en la caja de la batería.
5. Levante la batería de atrás y sáquela de la caja usando la correa para levantarla.
6. Deslice la batería del frente hacia atrás en la caja de la batería y sáquela como lo hizo en el paso 9.
7. Desconecte los conectores de las terminales poniendo atención a la polaridad de las terminales. Quite el sistema de cableado.
8. Repita el paso 6 para la otra batería.
9. Inspeccione las terminales en el sistema de cableado y los conectores en las baterías de reemplazo para asegurarse de que estén limpios.
10. Conecte los conectores de la terminal al sistema de cableado de las baterías nuevas, observe que la polaridad de los conectores coincida con la polaridad anterior.
11. Coloque las nuevas baterías dentro de la caja de la batería y vuelva a unir los conectores.
12. Coloque la tapa de la caja de la batería y asegúrela con el cinto de retención.
13. Vuelva a conectar el cable de energía.

Para máximo rendimiento, se recomienda que reemplace ambas baterías al mismo tiempo.

Si necesita ayuda contacte a su Distribuidor local

CONEXIONES DE LA BATERIA

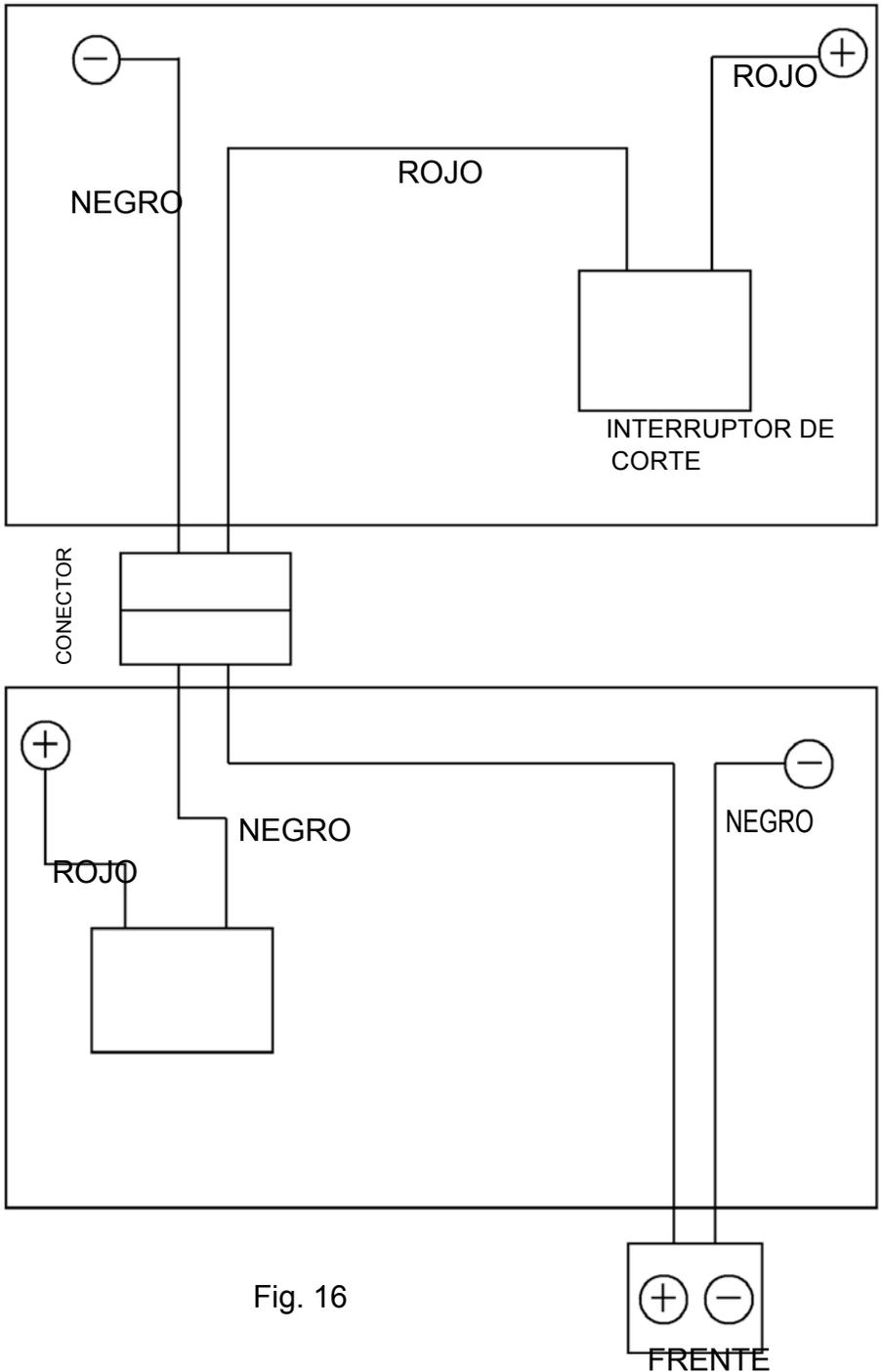


Fig. 16

LLANTAS

SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS PARA UNA REPARACIÓN RÁPIDA Y SEGURA:

1. Use una llave de trinquete y un dado para quitar el tornillo del centro del eje de la llanta.
2. Saque la llanta del eje.
3. Separe la llanta del aro de la llanta. (Sólo para el estilo neumático)
4. Saque la llanta y coloque una llanta nueva. (Sólo para el estilo neumático)
5. Deslice la llanta de nuevo sobre el eje.
6. Instale la tuerca de la llanta sobre el centro del eje y apriete.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DETECCIÓN DE FALLAS

Una silla de ruedas eléctrica requiere de atención básica para asegurar un servicio confiable.

Recomendamos que el usuario se asegure de que la silla eléctrica sea revisada regularmente sobre los requisitos de mantenimiento y reciba una revisión minuciosa de mantenimiento anual.

Recomendamos que su silla reciba al menos un servicio completo al año por parte de un distribuidor autorizado. Si nota algo irregular en su silla, llame a su distribuidor autorizado más cercano para recibir ayuda. Ellos le indicarán si necesita llevar su silla para reparación. Si tiene que regresar su silla, ellos le indicarán si existen unidades de reemplazo disponibles y el método necesario de envío y manejo.

MANTENIMIENTO ANUAL

Recomendamos que su silla reciba al menos un servicio completo al año por parte de un distribuidor autorizado. Esto asegurará que su silla funcione adecuadamente y ayuda a evitar futuras complicaciones. Esto debe incluir:

1. Checar las llantas.
2. Checar las baterías y terminales.
3. Checar la programación del controlador de acuerdo a las necesidades del usuario.
4. Checar el armazón de la silla de ruedas.
5. Checar la condición de la tapicería.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REGULAR

1. Evite golpear o sacudir el controlador y la palanca de control.
2. Evite la exposición prolongada de su silla de ruedas eléctrica a condiciones extremas como calor, frío o humedad.
3. Mantenga el controlador y la palanca de control limpias.
4. Inspeccione todos los conectores del controlador, apriete y asegúrelos adecuadamente.
5. Nunca lave con una manguera su silla eléctrica o la coloque en contacto directo con el agua.

Mantenga la tapicería y el armazón limpio, límpielos con un trapo suave particularmente después de manejar bajo condiciones húmedas, lodosas o arenosas. No use materiales abrasivos fuertes durante la limpieza. No aplique limpiadores o solventes líquidos directamente sobre el controlador, cargador de la batería o cualquier conexión eléctrica.

7. Mantenga las llantas libres de pelusa, cabello, arena y fibras de la alfombra.
8. Engrase ligeramente con aceite el tornillo del eje, los ejes de las llantas y los cojinetes cada tres meses.
9. Utilice solamente las baterías recomendadas y cambie las baterías sólo de distribuidores calificados.
10. Cargue las baterías con regularidad. Asegúrese que los conectores principales del cargador están conectados adecuadamente dentro de los enchufes. No los desconecte jalando del cordón.
11. Con el controlador apagado verifique la condición de la palanca de control. Asegúrese de que no esté doblado o dañado y regresa a la posición del centro al soltarla. Inspeccione visualmente la bota, no trate de repararla. Vea un distribuidor autorizado si existe cualquier problema.
12. Inspeccione visualmente los arneses del controlador. Asegúrese de que no están quemados o cortados o que tengan alambres expuestos. Consulte con un distribuidor autorizado si tiene un problema con cualquiera de estos arneses.
13. Asegúrese que todas las partes del sistema del controlador están sujetas de manera segura a su Silla de ruedas eléctrica. No apriete los tornillos de más.

ALMACENAJE

Su silla de ruedas debe guardarse en un lugar seco sin estar expuesta a temperaturas extremas. Cuando la vaya a guardar desconecte las baterías de su silla eléctrica. Vea la sección “Baterías y cargado” en este manual. Si no guarda la unidad bajo las condiciones mencionadas arriba, el armazón se puede oxidar y las partes electrónicas pueden dañarse.

LISTA DE REVISION PARA ENCONTRAR FALLAS

PROBLEMA: Las luces del controlador parpadean.

ACCIÓN: Si las luces parpadean inmediatamente después de encender la unidad y activar la palanca de control, apague la unidad, espere unos cuantos segundos, luego enciéndala de nuevo. Espere dos segundos antes de activar la palanca de control.

PROBLEMA: La luz del controlador parpadea lentamente mientras maneja.

ACCIÓN: Un parpadeo lento quiere decir que el nivel de carga de la batería está bajo y debe cargarse lo más pronto posible.

PROBLEMA: La luz del controlador parpadea continuamente y la silla no funciona.

ACCIÓN: El parpadeo continuo de la luz indica que puede haber un problema eléctrico. Apague la unidad, desactive la rueda de embrague y busque ayuda. Contacte a su Distribuidor y avísele del problema.

PROBLEMA: La luz roja del cargador de batería no se enciende cuando se conecta el cargador.

ACCIÓN: Verifique que todos los cables estén conectados y que el interruptor principal esté encendido. Si esto no hace que la luz roja del cargador se encienda, apague la unidad, desconecte el cable principal del cargador de la batería. Contacte a su Distribuidor y avísele del problema.

PROBLEMA: Es difícil conducir la silla.

ACCIÓN: Primero, verifique que las llantas están en las posiciones adecuadas. Segundo, verifique que ambos embragues estén activados correctamente.

NOTA:

Si detecta que existen problemas con los motores, el cargador de la batería, el controlador o daño al armazón de la silla eléctrica, se recomienda que se ponga en contacto con el agente de servicio autorizado más cercano.

Si nota cualquier otro aspecto irregular de su silla o si no responde después de realizar las inspecciones anteriores, llame a su agente de servicio autorizado más cercano. Ellos le indicarán si necesita llevar su silla eléctrica para reparación. Si tiene que regresar su silla, ellos le indicarán si existen unidades de reemplazo disponibles y el método necesario de envío y manejo.

GARANTÍA LIMITADA

Un año de garantía a partir de la fecha de compra para cualquiera de las partes mencionadas abajo.

Esta garantía no incluye desgaste “normal” a cualquier parte de este producto.

- Motor eléctrico y cargador de la batería
- Microprocesador del controlador
- Montaje de los pies
- Descansabrazos
- Refuerzos transversales
- Varas del respaldo

EXCEPCIONES A LA GARANTÍA

El conmutador del motor no está garantizado si el daño se ocasionó por no reemplazar los cojinetes del motor después de desgaste pesado de los cojinetes. Los cojinetes del motor son artículos que se desgastan y no están garantizados.

Los armazones laterales de la silla están garantizados por un periodo de CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

- Baterías
- Llantas
- Tapicería y asiento
- Reparaciones y/o modificaciones realizadas a cualquier parte sin previa y específica autorización escrita de Drive Medical Design & Manufacturing
- Mano de obra, llamadas de servicio, envío y otros cobros incurridos por la reparación del producto a menos que sea específicamente realizado por un distribuidor autorizado.

DAÑO OCASIONADO POR:

- Derrame o fuga del fluido de la batería
- Abuso, mal uso, accidente o negligencia
- Operación, mantenimiento o almacenamiento inadecuado
- Uso comercial u otro uso que no sea el normal

ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- Esta garantía sólo se aplica a la compra original.
- La Compañía no aceptará responsabilidad si la falla se debió al mal uso o no acatar las instrucciones indicas en este Manual del Usuario.
- Si se presenta una falla, el dueño tiene la responsabilidad de notificar inmediatamente a la compañía o al Distribuidor de donde compró la silla.
- Todos los costos relacionados con el envío de la silla o cualquier componente que no funcione son responsabilidad del dueño.
- Los costos laborales incurridos en la instalación o reparación de las partes mencionadas anteriormente más todos los gastos de envío no se incluyen en la garantía.
- Cualquier parte defectuosa debido a fallas de mano de obra y/o materiales puede ser reemplazada o reparada a juicio de la Compañía sin cargo al dueño de la silla.
- La garantía se anulará si se ha realizado servicio de reparación o modificación de partes no autorizado.
- La compañía no garantiza el armazón o cualquier parte dañada cuando se excede el límite de peso máximo de 300 libras (136 kg).

Registro de garantía de la silla eléctrica Cirrus Plus EC

Por favor escriba con letra de molde

No. de serie _____ Fecha de compra ___ / ___ / ___

Nombre del dueño _____

Dirección _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Información adicional necesaria del Dueño

Indique por favor cómo se familiarizó con su silla eléctrica Cirrus Plus EC al llenar la siguiente información.

_____ He leído y entiendo completamente

_____ el Manual del Usuario, especialmente las secciones sobre instrucciones de operación, pautas de seguridad, mantenimiento e instrucciones de la batería.

_____ Registro de garantía de la silla eléctrica Cirrus Plus EC

Instrucciones de la batería – Sólo debe usar baterías selladas de plomo-ácido o baterías tipo celda de gel. Las baterías deben también estar selladas, ser de ciclo profundo y libre de mantenimiento, de no ser así, la batería afectará el desempeño del vehículo y anulará la garantía.

_____ Mi distribuidor me ha enseñado cómo operar mi silla eléctrica Cirrus Plus EC.

Firma _____ Nombre del distribuidor _____

Teléfono (____) _____ Teléfono del distribuidor (____) _____

Correo electrónico _____

Comentarios _____

PRIMERO DOBLE AQUÍ

Place
Stamp
Here

drive

MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050

LUEGO DOBLE AQUÍ

SELLE CON CINTA, NO CON GRAPAS

Part Washington, NY 11050
Toll Free: 877-224-0946 • 516-998-4600
Website: www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING