

Elite Traveller

Manual de Usuario



GOGO

The First Name In Travel Mobility[®]

Pride
Mobility Products Corp.

Exeter, PA
St. Catharines, ON

1-800-800-8586

www.pridemobility.com

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Los símbolos que se muestran a continuación son utilizados en este manual y en el scooter para identificar advertencias y avisos importantes. Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.



¡ADVERTENCIA! Indica una situación potencialmente peligrosa y que puede causar lesiones o daños en el equipo del usuario. (Símbolo negro en un triángulo amarillo con borde negro).



¡OBLIGATORIO! Pasos que han de realizarse como se indica. En caso contrario, podría provocar en el usuario o en terceros lesiones, o daños en el material (símbolo blanco sobre azul).



¡PROHIBIDO! Estas acciones están prohibidas y no deberán realizarse bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento de esta prohibición puede provocar lesiones o daños en el material (símbolo negro con círculo y raya rojos).

Por favor, rellene la siguiente información para tener siempre a mano:

Proveedor Pride: _____	Fecha de compra: _____
Dirección: _____	
Número de teléfono: _____	
Número de serie: _____	

NOTA: *El presente manual de instrucciones recoge las últimas especificaciones e informaciones disponibles en el momento de su publicación. Pride se reserva el derecho a aportar modificaciones en caso necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de esta guía y el producto que ha comprado.*

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	4
II. SEGURIDAD.....	5
III. EMI/RFI	16
IV. ESPECIFICACIONES	17
V. SU TRAVEL SCOOTER	19
VI. BATERÍAS Y SU CARGA	23
VII. FUNCIONAMIENTO	28
VIII. OPTIMIZAR EL CONFORT	30
IX. DESMONTAJE/MONTAJE	32
X. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	34
XI. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	36
XII. GARANTÍA	38

I. INTRODUCCIÓN

SEGURIDAD

Bienvenido a la Corporación Pride Mobility Products (Pride). El producto que acaba de adquirir combina los componentes más vanguardistas con lo último en **seguridad**, confort y estilo. Estamos seguros que las características de su diseño le proporcionarán toda la utilidad que usted exige en sus tareas cotidianas. Aprenda el manejo y cuidado correctos de este producto. Evitará así cualquier problema técnico y podrá disfrutar de él durante años.

Antes de utilizar su silla eléctrica por primera vez, **lea detenidamente** todas las instrucciones, advertencias y notas de este manual, además de cualquier otro documento adjunto. Para garantizar su **seguridad**, recuerde que tanto usted como su proveedor, cuidador o profesional sanitario deberán utilizar el sentido común a la hora de manejar este producto.

Si hay algo que no entiende o si necesita ayuda adicional para la configuración o el funcionamiento, consulte con su proveedor autorizado Pride. **Si no sigue las instrucciones, advertencias y notas de este manual y aquellas situadas en su producto Pride podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros o daños en el producto, además de anular la garantía del mismo.**

ACUERDO DEL COMPRADOR

Al aceptar la entrega de este producto, el comprador se compromete a no cambiar, alterar ni modificar el mismo, ni a quitar o inutilizar o volver inseguros los dispositivos de protección y seguridad del producto. Asimismo, se compromete a instalar los kits de actualización que regularmente proporcione Pride con objeto de mejorar o preservar la utilización correcta de este producto.

SU OPINIÓN NOS INTERESA

Nos gustaría recibir sus preguntas, comentarios y sugerencias acerca de este manual. Coméntenos también acerca de la seguridad y fiabilidad de su nuevo scooter, y acerca del servicio prestado por su proveedor Pride. Notifíquenos de cualquier cambio de dirección, de manera que podamos tenerle al corriente de información importante relativa a su seguridad, productos y opciones nuevas que mejoren su capacidad para utilizar y disfrutar de su scooter. No dude en escribirnos a la siguiente dirección:

Pride Mobility Products Corporation
Attn: Customer Care Department
182 Susquehanna Ave.
Exeter, PA 18643-2694

NOTA: *Si perdiera o extraviara la tarjeta de inscripción de su producto o este manual, póngase en contacto con nosotros y le enviaremos inmediatamente uno nuevo.*

CLUB DE LOS PROPIETARIOS PRIDE

Como propietario de un producto Pride, le animamos a unirse al “Pride Owners Club”. Rellene y envíe la tarjeta de registro adjunta o visite el sitio web de Pride (www.pridemobility.com).

Desde nuestra página de inicio, seleccione “Owners Club” para entrar en la página dedicada a los propietarios actuales y potenciales de productos Pride. Podrá acceder a entrevistas, testimonios, ideas para el ocio, trucos para la vida diaria, información acerca de productos y su financiación, y tabloneros con mensajes interactivos. Los tabloneros de mensajes le ofrecen la posibilidad de comunicarse con otros clientes Pride o con representantes de Pride, que le ayudarán con cualquiera de sus preguntas o dudas.

II. SEGURIDAD

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Estos símbolos aparecen en su scooter y sirven para identificar advertencias, acciones obligatorias o prohibidas. Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.



Las baterías están fabricadas con materiales químicos corrosivos. Utilice únicamente baterías de gel o AGM; reducirá así los riesgos de derrame o explosión.



EMI-RFI- Este producto ha sido probado y aprobado para un nivel de inmunidad de 20 V/m.



Puntos de pinzamiento creados durante el montaje.



Lea con atención la información del manual de usuario.



Peso máximo soportado.



Desbloqueado y en modo manual.


Coloque la unidad sobre una superficie llana y sitúese detrás o a un lado de ésta para cambiar del modo conducción al modo manual, o viceversa.

Bloqueado y en modo conducción.

II. SEGURIDAD



Use sólo baterías AGM o de gel.

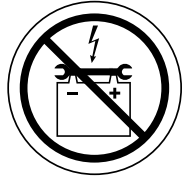

El contacto con herramientas puede producir descargas eléctricas.



No quite las ruedas antivuelco.




Al manejar el scooter, no utilice teléfonos celulares, walkie/talkies, ordenadores portátiles o cualquier otro emisor de radio.



Evite el contacto con la lluvia, nieve, hielo, sal o agua estancada siempre que le sea posible. Mantenga y guarde este producto en un lugar limpio y seco.



No retire el contacto de tierra del enchufe para evitar cualquier riesgo eléctrico. Si su toma de corriente tiene únicamente 2 orificios, instale un adaptador de 3 contactos adecuado. En caso contrario, podría sufrir lesiones o daños en el material.

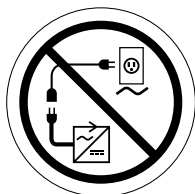

Evite lesiones y daños en el equipamiento. No conecte cables de prolongación al convertidor CA/CC ni al cargador de batería.



Póngase en contacto con su proveedor autorizado Pride para saber cómo reciclar o deshacerse del producto Pride y su envoltorio.

II. SEGURIDAD

GENERAL



¡OBLIGATORIO! Antes de utilizar su scooter por primera vez, lea y siga todas las instrucciones de este manual.

Este scooter es un dispositivo que incorpora las últimas tecnologías tendentes a aumentar su movilidad. Pride ofrece una amplia gama de productos ajustados a sus necesidades particulares. Recuerde que la decisión final acerca de la compra de un determinado tipo de scooter es responsabilidad exclusiva del usuario de dicho scooter, capaz de tomar tal decisión, y de su profesional sanitario (por ej. médico, terapeuta, etc.).

El contenido de este manual está supeditado a los ajustes realizados por un experto en tales dispositivos para adaptarlo al usuario, habiendo asistido al profesional sanitario prescriptor o al proveedor autorizado Pride en lo que respecta a la asistencia para la utilización de este producto.

Existen determinadas situaciones, como algunas enfermedades, para las que será obligatoria la presencia de una persona debidamente cualificada durante el manejo del scooter. Esta persona encargada podrá ser un miembro de la familia o un asistente sanitario especialmente preparado para ayudarle en las tareas diarias que realice mientras utiliza el scooter.

Al empezar a utilizar el scooter, probablemente se encuentre con situaciones para las que necesite una mayor práctica. Tómese el tiempo necesario. Pronto sentirá una mayor confianza y control en el manejo a través de puertas, al girar en curvas o al entrar o salir de ascensores, rampas o en superficies irregulares.

Seguidamente, se muestran algunas precauciones, trucos y otras consignas de seguridad que le ayudarán a familiarizarse con el funcionamiento de su scooter.

MODIFICACIONES

Pride ha diseñado este scooter para proporcionarle la máxima movilidad y utilidad. Ahora bien, no intente modificar ni añadir, quitar o desmontar características, piezas o funciones de su scooter para evitar cualquier riesgo de lesión o daños en su producto.



¡ADVERTENCIA! No realice ningún cambio en su scooter si no ha sido autorizado por Pride. Las modificaciones no autorizadas pueden provocar lesiones o daños en su scooter.

PIEZAS EXTRAÍBLES



¡ADVERTENCIA! Evite las lesiones corporales y los daños en el producto. No intente levantar o mover el scooter agarrando por sus piezas extraíbles, como el reposabrazos, el asiento o la carrocería.

II. SEGURIDAD

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PREVIA

Familiarícese con su scooter y sus funciones. Pride le recomienda que realice una inspección previa de seguridad para confirmar que su scooter funciona de manera correcta y segura.

Antes de utilizar el scooter, inspeccione lo siguiente:

- Compruebe que el inflado de los neumáticos es el correcto.
- Compruebe todas las conexiones eléctricas. Asegúrese de que estén tensas y sin corrosión.
- Compruebe todas las conexiones del regulador al panel eléctrico. Asegúrese de que estén bien tensadas.
- Compruebe los frenos.
- Compruebe la carga de las baterías.

NOTA: Si encuentra algún problema, póngase en contacto con su proveedor autorizado Pride.

INFLADO DE RUEDAS

Si su scooter está equipado con ruedas neumáticas, verifique regularmente la presión del aire. Las presiones de inflado adecuadas prolongan la vida de los neumáticos y garantizan el buen funcionamiento de su scooter.



¡ADVERTENCIA! Es muy importante mantener en todo momento una presión de 2-2.4 bar (30-35 psi) en las ruedas neumáticas. No infle excesiva ni escasamente las ruedas. Una baja presión puede provocar una pérdida de control, y unos neumáticos demasiado inflados pueden reventar. Si no mantiene constantemente una presión de 2-2.4 bar (30-35 psi) en los neumáticos, se pueden producir pinchazos en las ruedas, llegando a provocar lesiones graves o daños en su scooter.

¡ADVERTENCIA! Infle los neumáticos de su scooter con un sistema de inflado reglamentario con manómetro. Si utiliza un sistema no reglamentario puede producir un inflado excesivo, llegando incluso a reventar la rueda y provocar lesiones.

LIMITACIONES DE PESO

La utilización de su scooter deberá ajustarse al peso máx. autorizado. Consulte el cuadro de especificaciones.



¡ADVERTENCIA! La superación de este límite de peso anula la garantía y puede provocar lesiones y daños en su scooter. Pride no se hará responsable de las lesiones y daños materiales que se deriven del incumplimiento de dicha limitación de peso.

¡ADVERTENCIA! No transporte pasajeros mientras conduce el scooter. En caso contrario, podría sufrir lesiones o daños en el material.

CONDUCCIÓN POR PENDIENTES

Son cada vez más los edificios con rampas de acceso sencillo y seguro. Algunas rampas son en zigzag (giros de 180 grados), por lo que deberá tener una excelente habilidad para girar esquinas con su scooter.

- Al aproximarse a la bajada de una rampa o pendiente, actúe con extrema precaución.
- Describa amplios movimientos con las ruedas frontales en las curvas cerradas. De esta forma, las ruedas traseras seguirán un amplio arco, no rozarán la curva, ni chocarán, ni quedarán colgadas del antepecho de las curvas.
- Al descender una rampa, ajuste la velocidad del scooter a su nivel mínimo para poder controlar de forma segura la bajada.
- Evite las detenciones y arranques bruscos.

II. SEGURIDAD

Al subir una pendiente, intente mantener el scooter siempre en movimiento. Si debe detenerlo, vuelva a arrancar despacio y acelere con precaución. Al bajar una pendiente, ajuste al mínimo la velocidad y conduzca siempre hacia delante. Si el vehículo empieza a bajar más rápido de lo previsto o deseado, deje que vaya disminuyendo la velocidad hasta detenerse soltando la palanca aceleradora. Luego, empuje ligeramente la palanca hacia delante para bajar de manera controlada.

¡ADVERTENCIA! Al subir una pendiente, no zigzaguee ni conduzca en ángulo. Conduzca el scooter en línea recta para reducir el riesgo de vuelco o caída. Esto reduce considerablemente la posibilidad de vuelco o caída. Extremar siempre las precauciones al subir o bajar una pendiente.

¡ADVERTENCIA! No conduzca por el borde de una pendiente o subiendo o bajando en diagonal una pendiente; a ser posible, no se detenga mientras sube o baja una pendiente.



¡ADVERTENCIA! Nunca se desplace por rampas potencialmente peligrosas (por ej. superficies nevadas, con hielo, hierba cortada u hojas húmedas).

¡ADVERTENCIA! Cuando esté en una subida o bajada, nunca utilice el modo manual si está sentado o de pie junto a el scooter. De lo contrario, podría provocar lesiones o daños en el scooter.

¡ADVERTENCIA! A pesar de que su scooter puede subir rampas con mayor inclinación que la de la fig.1, bajo ninguna circunstancia deberá exceder las directrices de inclinación o cualquier otra especificación de este manual, ya que correría el riesgo de desestabilizar la silla, pudiendo provocar lesiones físicas o daños en su scooter.

Las rampas de acceso público para minusválidos están reguladas por el gobierno de cada país y, por tanto, no siempre comparten el mismo porcentaje de inclinación estándar. Algunas pendientes son naturales y otras, artificiales, puede que no estén diseñadas para scooters. La fig. 1 ilustra la estabilidad del Travel Scooter y su capacidad para subir pendientes con diferentes cargas de peso y en condiciones de prueba controladas.

Estas pruebas se realizaron con el asiento en su posición más elevada y colocado en la parte más posterior de la base del asiento. Use esta información como guía. Tenga en cuenta que la capacidad para franquear pendientes efizcamente depende de su propio peso, de la velocidad, del ángulo de aproximación y de la configuración del scooter.

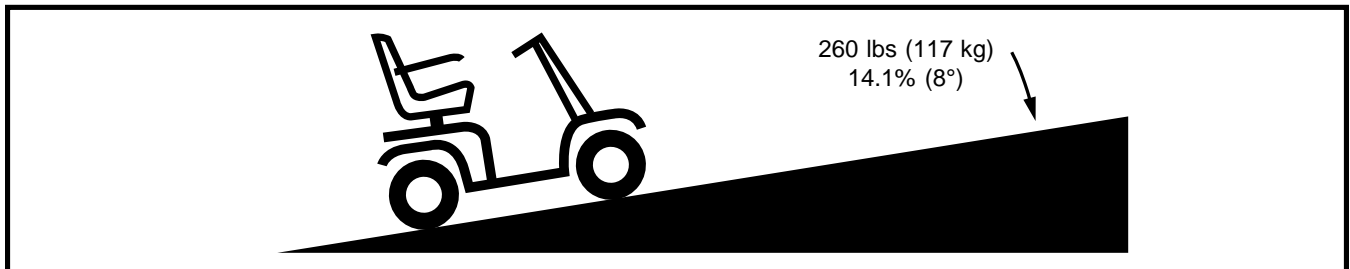


Figura 1. Ángulos de inclinación máxima recomendados

¡ADVERTENCIA! Cualquier intento de subir o bajar una pendiente más pronunciada que la que aparece en la fig. 1 podría desestabilizar su Travel Scooter, provocando un vuelco y lesiones en el usuario.



¡ADVERTENCIA! Nunca lleve una bombona de oxígeno que pese más de 15 lbs (6.80 kg). Nunca cargue la cesta frontal o posterior con más de 15 lbs (6.80 kg).

II. SEGURIDAD

Al acercarse a una pendiente, inclínese un poco hacia delante (fig. 2 y 2A). Este desplazamiento del centro de gravedad hacia el frente mejora la estabilidad del Travel Scooter.

NOTA: Al andar por rampas, si suelta la palanca aceleradora mientras avanza, el Travel Scooter podría retroceder aprox. 1 pie (30.48 cm) antes de activar el freno. Si suelta la palanca aceleradora mientras da marcha atrás, el Travel Scooter podría retroceder aprox. 3 pies (91.44 cm) antes de activar el freno.

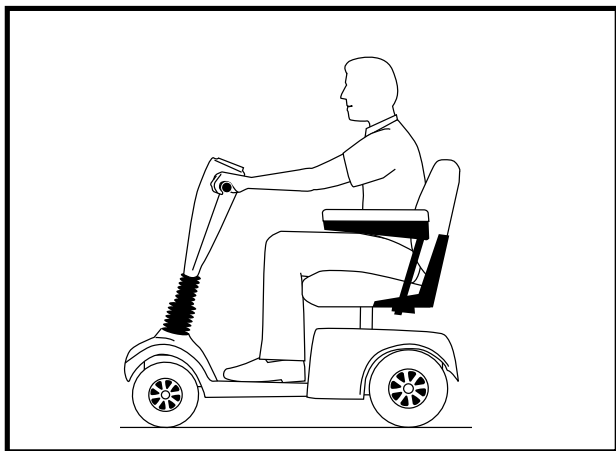


Figura 2. Posición de conducción normal

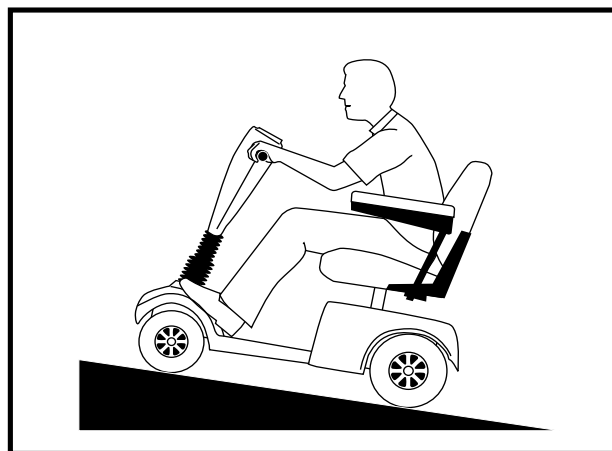


Figura 2A. Mayor estabilidad durante la conducción

TOMAR CURVAS

Velocidades excesivas en curvas pueden ocasionar descompensaciones y vuelcos. Los factores que pueden provocar un vuelco son, entre otros: la velocidad al tomar una curva, el ángulo de giro, las superficies irregulares, los firmes inclinados, el pasar de una zona de tracción baja a otra de tracción alta (por ej. de un campo de hierba a un firme pavimentado, sobre todo a gran velocidad y girando), y los cambios bruscos de dirección. No se recomiendan velocidades altas al tomar una curva. Si teme volcar en una curva, reduzca la velocidad y el ángulo de giro (por ej. abriendo el ángulo de giro) para impedir que el scooter vuelque.



¡ADVERTENCIA! Cuando tome curvas cerradas, disminuya la velocidad de la silla. Esto reduce considerablemente el riesgo de vuelco o caída. Para evitar lesiones o daños en el material, aplique siempre el sentido común al tomar las curvas.

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS FRENOS

Su scooter está equipado con dos potentes sistemas de frenado:

1. Regenerativo: utiliza la electricidad para ralentizar rápidamente el vehículo cuando la palanca de mando vuelve a su posición central.
2. Frenos de disco de estacionamiento: se activan mecánicamente una vez que los frenos regenerativos han reducido la velocidad del vehículo, o cuando falta la alimentación del sistema, cualquiera que sea el motivo.

II. SEGURIDAD

CONDUCCIÓN EN EXTERIORES

Este scooter ha sido diseñada para proporcionarle una estabilidad óptima en condiciones normales de utilización: superficies secas y regulares, de asfalto u hormigón. Sin embargo, Pride reconoce que habrá ocasiones en que deberá utilizar su scooter en otro tipo de superficies, por lo que su scooter ha sido pensada para ser utilizada también en caminos de tierra, césped y piedra. Así, podrá utilizar su scooter en parques y áreas verdes.

- Reduzca la velocidad al conducir por terrenos irregulares o superficies blandas.
- Evite terrenos con hierbas altas que puedan enredar el tren de rodaje.
- Evite superficies con piedra suelta y arena.
- Si no está seguro acerca del terreno, evite conducir.

CAMINOS PÚBLICOS Y CARRETERAS



¡ADVERTENCIA! No debe conducir su scooter en caminos públicos y carreteras. Tenga en cuenta que los conductores de automóviles no siempre podrán distinguir si hay una persona manejando el scooter. Obedezca las normas de tráfico peatonales. Espere hasta que su camino esté libre y luego continúe con extrema precaución.

OBSTÁCULOS PERMANENTES (PASOS, BORDILLOS, etc.)

¡ADVERTENCIA! No conduzca cerca de superficies elevadas, salientes peligrosos u otros obstáculos (aceras, porches, escaleras, etc.).

¡ADVERTENCIA! No intente subir ni bajar obstáculos demasiado altos, ya que podría ocasionarle lesiones físicas o daños materiales.



¡ADVERTENCIA! Nunca intente manejar su silla marcha atrás al bajar peldaños, aceras u otros obstáculos, ya que ésta corre el riesgo de volcar y ocasionarle lesiones físicas.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que su Travel Scooter se desplaza perpendicularmente en el caso de que tenga que subir o bajar un bordillo (fig. 3 y 3A).

¡ADVERTENCIA! Si no cuenta con la asistencia de un ayudante, no intente subir o bajar obstáculos superiores a 5 cm (2 pulgadas).

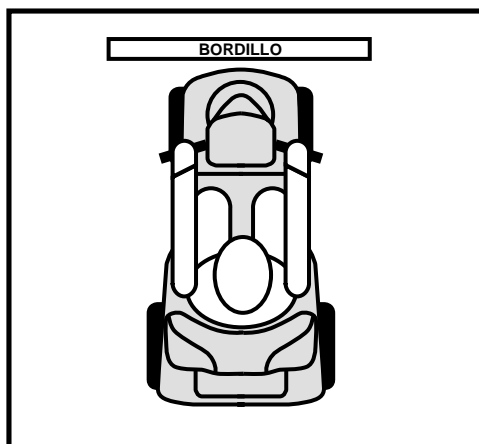


Figura 3. Aproximación Correcta

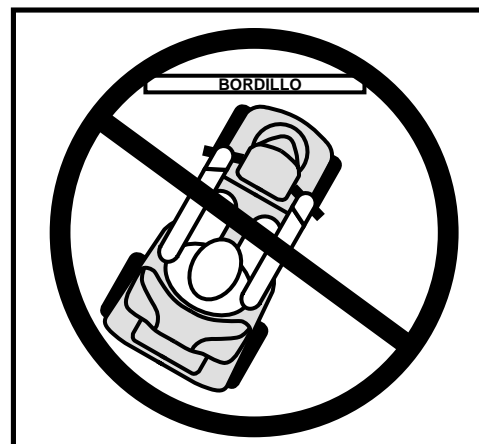


Figura 3A. Aproximación Incorrecta

II. SEGURIDAD

PRECAUCIONES CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

Siempre que sea posible, evite exponer su scooter a condiciones climáticas adversas. Si le sorprende la lluvia, la nieve o una ola de frío o calor intensos mientras maneja el scooter, diríjase al refugio más cercano tan pronto como pueda. Seque completamente el scooter antes de guardarlo, cargarlo o manejarlo.



¡ADVERTENCIA! La conducción con lluvia, nieve o sobre superficies con sal, rociadas, heladas o resbaladizas puede provocar lesiones o daños en el scooter y el sistema eléctrico. Mantenga y guarde su scooter en un lugar limpio y seco.

MODO MANUAL

Su Travel Scooter está equipado con una palanca para avanzar en modo manual, lo que permite que otra persona empuje el scooter. Para más información acerca del funcionamiento del modo manual, consulte el capítulo V, “Su Travel Scooter”.



¡ADVERTENCIA! Cuando el Travel Scooter está en modo manual, el sistema de frenado permanece inactivo.

- Desactive los motores sólo en superficies llanas.
- Asegúrese de sacar la llave de la cerradura de contacto.
- Sitúese detrás o a un lado del Travel Scooter para activar y desactivar el modo manual. Nunca lo haga sentado en el scooter.
- Cuando haya terminado de empujar el scooter, vuelva siempre al modo conducción para bloquear los frenos.

En caso contrario, podría provocar lesiones o daños materiales en su Travel Scooter.

Una característica añadida del Travel Scooter es la protección “**push-too-fast**”, que evita que el scooter tome demasiada velocidad mientras se empuja manualmente.

El funcionamiento de esta protección variará en función de los siguientes casos:

- Si está en modo manual y con la llave desconectada, el regulador del Travel Scooter activará los frenos de recuperación cuando se empuje el scooter a una velocidad superior al tope máximo programado. En dicho caso, el regulador funciona como un control de velocidad.
- Si está en modo manual y con la llave conectada, encontrará bastante resistencia a cualquier velocidad. Así se evita que el Travel Scooter se deje llevar por el impulso si accidentalmente activa la palanca manual mientras conduce el scooter.

UTILIZACIÓN DE ESCALERAS Y ESCALERAS ELÉCTRICAS

Los scooters no están pensados para subir o bajar escaleras. Utilice siempre el ascensor.



¡ADVERTENCIA! No utilice nunca su silla eléctrica para franquear una escalera, ya que podría lesionarse o causar daños a otras personas y graves deterioros en su silla.

ABRIR PUERTAS

- Compruebe si la puerta abre hacia usted o en sentido contrario.
- Gire el pomo o empuje la empuñadura o barra de la puerta.
- Conduzca con cuidado hacia delante para empujar y abrir la puerta, o hacia atrás para tirar y abrir.

II. SEGURIDAD

UTILIZACIÓN DE ASCENSORES

Los ascensores actuales tienen un mecanismo de seguridad que, al pulsarlo, abre las puertas.

- Si se encuentra en la entrada de un ascensor y la puerta empieza a cerrarse, toque el borde de goma de ésta con una mano o con el scooter y la puerta volverá a abrirse.
- Procure no dejar atravesados en las puertas carteras, paquetes o accesorios del scooter.

LEVANTAR EL SCOOTER

Si necesita usar un equipo de elevación, Pride le recomienda que lea detenidamente el manual del usuario que acompaña dicho producto antes de utilizarlo.



¡ADVERTENCIA! No se sienta en el Travel Scooter mientras esté utilizando un equipo de elevación. El Travel Scooter no ha sido diseñado pensando en esa utilización, y Pride no se hará responsable de ningún daño o lesión que se derive de tal uso.

BATERÍAS

Además de las siguientes advertencias, asegúrese de leer detenidamente toda la información sobre el manejo de las baterías.

¡ADVERTENCIA! Las baterías del Travel Scooter son pesadas (consulte el cuadro de especificaciones). Levantar objetos muy pesados puede provocarle lesiones físicas. En caso necesario, solicite la ayuda de alguien físicamente capaz para manipular las baterías de su scooter.



¡ADVERTENCIA! Evite que las baterías se congelen. Nunca cargue una batería congelada.

¡ADVERTENCIA! Proteja siempre las baterías de temperaturas heladas y nunca cargue una batería congelada, ya que podría provocarle lesiones físicas o daños en la batería.

¡ADVERTENCIA! Los cables ROJOS (+) deben conectarse a los bornes/terminales de batería (+). Los cables NEGROS (-) deben conectarse a los bornes/terminales de batería (-). Una disposición incorrecta de cables podría provocar lesiones en el usuario y daños en el scooter. En caso de estar dañados, CAMBIE inmediatamente los cables.

ELIMINACIÓN Y RECICLADO DE BATERÍAS

Si alguna batería está dañada o agrietada, guárdela inmediatamente en una bolsa plástica y llame a su proveedor autorizado Pride para saber dónde tirarla. Su proveedor autorizado Pride dispone además de la información necesaria sobre reciclado de baterías viejas o dañadas, que es lo que nosotros recomendamos.

PREVENCIÓN DE MOVIMIENTOS ACCIDENTALES



¡ADVERTENCIA! Si va a permanecer sentado y sin moverse durante algún tiempo, apague el scooter. Evitará así cualquier movimiento originado al tocar accidentalmente la palanca aceleradora. Eliminará también el riesgo de movimientos accidentales debidos a fuentes electromagnéticas (EM). De lo contrario, podría sufrir lesiones físicas.

II. SEGURIDAD

TRANSPORTE EN UN VEHÍCULO A MOTOR

Pride recomienda NO permanecer sentado en el scooter mientras viaja en un vehículo en movimiento. El scooter debe guardarse en el maletero del automóvil o furgoneta, con las baterías extraídas y sujetadas correctamente.

¡ADVERTENCIA! Aunque su Travel Scooter puede tener cinturón de seguridad, dicho cinturón no está diseñado para garantizar su seguridad durante el transporte en un vehículo. Cualquier persona que viaje en un vehículo motorizado deberá utilizar el cinturón de seguridad del propio automóvil.



¡ADVERTENCIA! No permanezca sentado en el scooter dentro de un vehículo en movimiento. En caso contrario, podría sufrir lesiones o daños en el material.

¡ADVERTENCIA! Compruebe que tanto su scooter como las baterías estén bien sujetas y preparadas para el viaje. En caso contrario, podrían provocar lesiones físicas o daños en el scooter.

SUBIR Y BAJAR DEL TRAVEL SCOOTER

Para subir o bajar del Travel Scooter necesitará una buena dosis de equilibrio. Observe las siguientes consignas de seguridad cuando vaya a subirse o bajarse de su scooter:

- Saque la llave de la cerradura de contacto.
- Asegúrese de que el Travel Scooter no esté en modo manual. Consulte el capítulo V, “Su Travel Scooter”.
- Compruebe que el asiento esté bien sujeto.
- Levante los reposabrazos de forma que pueda subir y bajar más fácilmente del scooter.

¡ADVERTENCIA! Recuéstese hacia atrás lo más posible en el asiento para evitar que el Travel Scooter vuelque, pudiendo causarle lesiones.



¡ADVERTENCIA! Evite las lesiones corporales y los daños en el producto. No apoye todo su peso sobre los reposabrazos y no utilice éstos para llevar colgados objetos o transportar cosas, ya que se podría desequilibrar el scooter, y usted podría caer al suelo.

¡ADVERTENCIA! Evite apoyar todo el peso de su cuerpo en el piso del scooter, ya que éste podría volcarse, causándole lesiones físicas.

POSICIÓN CORRECTA DURANTE EL MANEJO DEL SCOOTER

Evite estirarse para alcanzar objetos o inclinarse mientras maneja el Travel Scooter. Al inclinarse adelante puede tocar accidentalmente la palanca aceleradora. Si se inclina lateralmente estando sentado puede desequilibrar y volcar el scooter. Es muy importante mantener un centro de gravedad equilibrado, evitando cualquier vuelco del scooter. Pride le recomienda establecer sus propias limitaciones y practicar estiramientos o inclinaciones en presencia de un asistente cualificado.

¡ADVERTENCIA! No se incline o doble sobre las rodillas para recoger objetos del piso del scooter o a ambos lados del mismo. Tales movimientos podrían alterar el centro de gravedad y la distribución de peso del Travel Scooter, que podría volcarse provocándole lesiones físicas.



¡ADVERTENCIA! Para evitar cualquier lesión, no toque las ruedas con las manos mientras conduce. Tenga en cuenta que si lleva ropa demasiado floja, ésta puede quedar atrapada en las ruedas.

II. SEGURIDAD

CINTURONES DE SEGURIDAD

Su proveedor autorizado Pride, terapeuta u otro profesional sanitario son los responsables de determinar cuál es el tipo de cinturón que deberá utilizar para conducir con total seguridad su scooter.



¡ADVERTENCIA! Si necesita utilizar un cinturón de seguridad para conducir el Travel Scooter, asegúrese de que esté bien apretado. En caso de caer del scooter, estará expuesto a graves lesiones físicas.

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y LIMITACIONES FÍSICAS

Aplice el sentido común cuando utilice un scooter. Tenga en cuenta las consignas de seguridad aplicables si está tomando medicamentos o si padece determinadas limitaciones físicas.



¡ADVERTENCIA! Consulte con su médico si está siendo medicado, si el farmacéutico le está prescribiendo medicamentos o si padece determinadas limitaciones físicas. Algunos medicamentos o limitaciones pueden alterar su habilidad para manejar el scooter de forma segura.

ALCOHOL

Aplice el sentido común cuando utilice una silla eléctrica. Tenga en cuenta las consignas de seguridad aplicables al consumo de alcohol.



¡ADVERTENCIA! No conduzca el scooter si se encuentra bajo los efectos del alcohol, ya que éste podría alterar sus facultades para conducir la silla eléctrica de forma segura.

III. EMI/RFI

INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS Y POR RADIOFRECUENCIA (EMI/RFI)



¡ADVERTENCIA! Las pruebas de laboratorio han demostrado que las ondas electromagnéticas y de radiofrecuencia pueden afectar al rendimiento de vehículos accionados eléctricamente.

Estas interferencias pueden provenir de teléfonos celulares, equipos emisor y receptor móviles (como transmisor-receptor portátil), estaciones de radio, estaciones de TV, radioaficionados, redes informáticas inalámbricas, microondas y buscapersonas. En determinados casos, dichas ondas pueden provocar movimientos involuntarios en el scooter. Cada vehículo eléctrico móvil viene equipado con una determinada inmunidad (o resistencia) a EMI. Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad, mayor será la protección contra las EMI. Este producto ha sido probado y aprobado para un nivel de inmunidad de 20 V/m.

¡ADVERTENCIA! Para prevenir cualquier movimiento accidental, apague el vehículo eléctrico antes de utilizar un teléfono celular, una radio bidireccional, una computadora portátil o cualquier otro tipo de transmisor de radio. Evite acercarse demasiado a emisoras de radio o televisión.



¡ADVERTENCIA! La instalación de accesorios o componentes en el vehículo móvil eléctrico podría aumentar el riesgo de interferencias EMI. No realice ningún cambio en su scooter si no ha sido autorizado por Pride.

¡ADVERTENCIA! El propio vehículo eléctrico podría alterar el rendimiento de los dispositivos electrónicos situados a proximidad.

NOTA: Para obtener más información sobre las EMI/RFI, entre en www.pridemobility.com. Si ocurriese algún movimiento involuntario o un bloqueo en los frenos, apague el scooter tan pronto como sea posible. Llame a Pride al 800-424-8205 para informar acerca del incidente.

IV. ESPECIFICACIONES

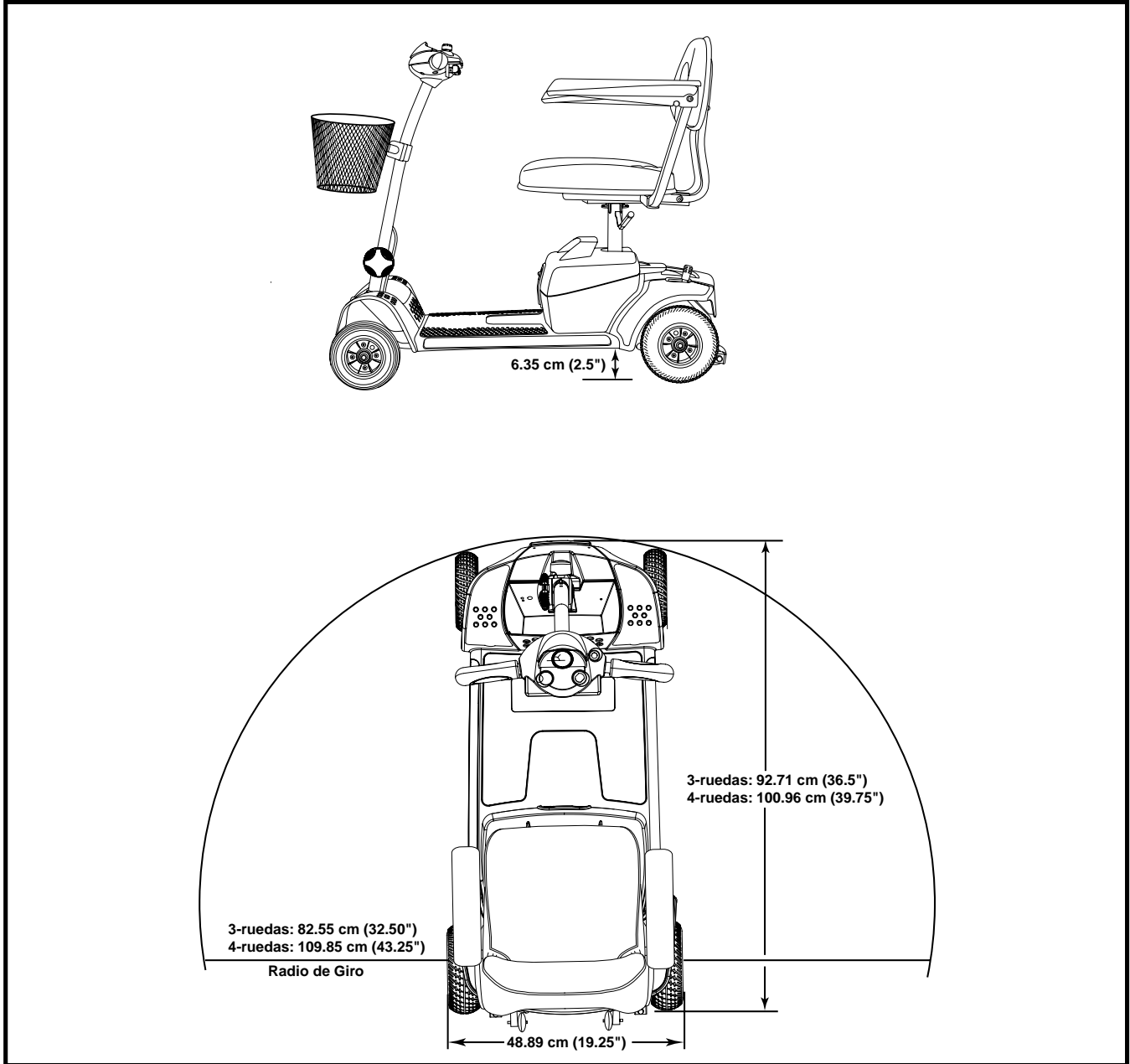


Figura 4. Dimensiones del Travel Scooter (en imagen, con el paquete de baterías 17AH opcional)

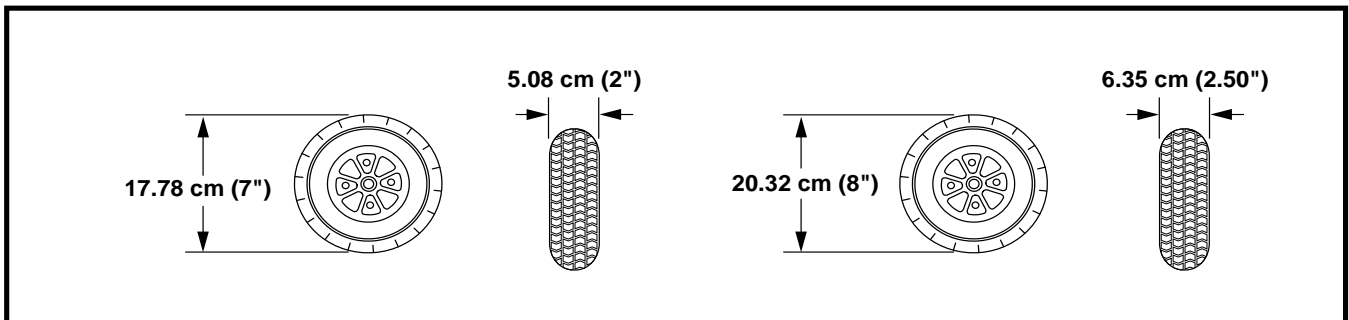


Figura 4A. Neumáticos frontal y posterior

IV. ESPECIFICACIONES

Números de modelos	3-ruedas: SC40E 4-ruedas: SC44E
Cap. máx. de sortear obstáculos	5.08 cm (2 pulgadas)
Colores disponibles	Rojo, Azul, Plata (paneles intercambiables)
Longitud total²	3-ruedas: 92.71 cm (36.5 pulgadas) 4-ruedas: 100.96 cm (39.75 pulgadas)
Anchura total²	48.89 cm (19.25 pulgadas)
Peso total sin paquete de baterías	3-ruedas: 34.01 kg (75 libras) 4-ruedas: 35.60 kg (78.5 libras)
Pieza más pesada una vez desmontado (sección frontal)	3-ruedas: 12.70 kg (28 libras) 4-ruedas: 14.74 kg (32.5 libras)
Radio de giro¹	3-ruedas: 82.55 cm (32.5 pulgadas) 4-ruedas: 109.85 cm (43.25 pulgadas)
Velocidad (máx)¹	variable hasta 7.24 km/h (4.5 mph)
Autonomía por carga¹	(con baterías 12 AH) hasta 16.09 km (10 millas)
Distancia al suelo²	6.35 cm (2.5 pulgadas) en la parte central
Capacidad de carga	117 kg (260 libras)
Asiento estándar	Moldeado Material: vinilo negro
Sistema automotor	tracción posterior, transeje sellado con motor CC de 24 voltios
Sistema de frenos dual	electrónico, de recuperación y electromecánico
Tipo de rueda	Tipo: macizas (ruedas anti-pinchazo) Tamaño: 5 cm x 17.78 cm (2 pulgadas x 7 pulgadas); frontal 6.35 cm x 20.32 cm (2.5 pulgadas x 8 pulgadas); posterior
Requisitos de las baterías	Tipo: dos 12 V, ciclo profundo (AGM o gel) Tamaño: 12 AH (17AH opcional) Peso: 4.08 kg (9 libras) cada una (para baterías uniformes 12 AH)
Peso del paquete de baterías	12 AH: 9.07 kg (20 libras); 17 AH: 14.96 kg (33 libras)
Cargador de batería	Cargador externo

(1) Varía según el peso del usuario, el tipo de terreno y el estado de baterías y ruedas.

(2) Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ o -) 3 %.

NOTA: Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

V. SU TRAVEL SCOOTER

CONSOLA DEL MANILLAR

En la consola del manillar están ubicados todos los controles necesarios para manejar el Travel Scooter: cerradura de contacto, palanca aceleradora, claxon, regulador de velocidad e indicador de batería (fig. 5).



¡ADVERTENCIA! No deje que la consola se humedezca. Si la consola estuviera humedecida, espere hasta que se seque completamente antes de manejar el Travel Scooter.

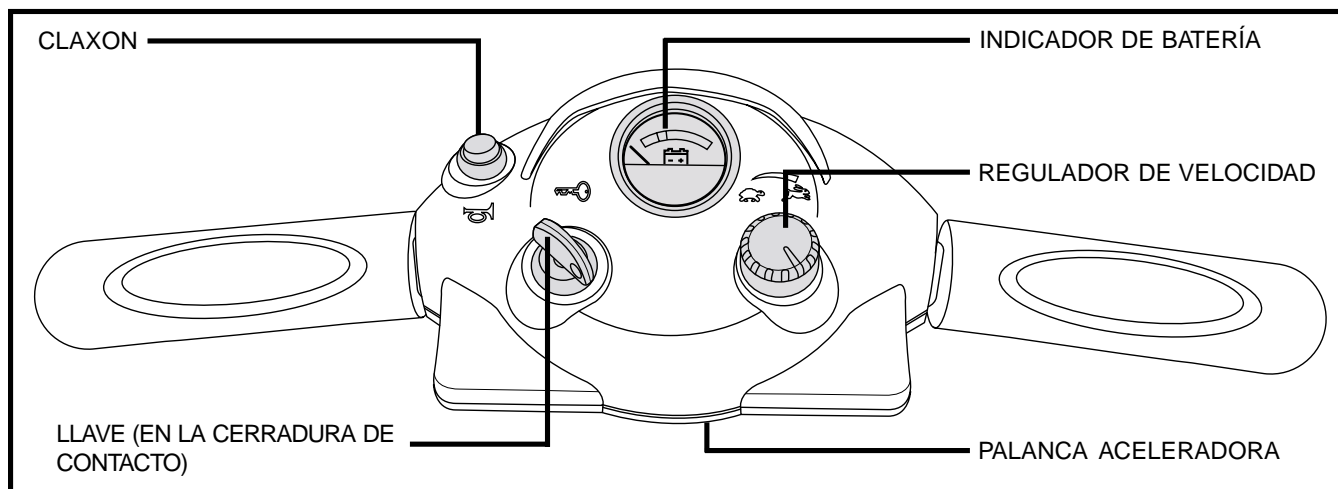


Figura 5. Consola del manillar

CERRADURA DE CONTACTO

- Introduzca la llave en la cerradura de contacto y gírela en sentido horario para encender el Travel Scooter.
- Gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para apagar el scooter.

Aunque puede dejar la llave en la cerradura de contacto con el Travel Scooter apagado, le recomendamos quitarla para evitar cualquier uso no autorizado de su scooter.



¡ADVERTENCIA! Si mueve la llave a la posición "off" con el scooter en movimiento, activará los frenos electrónicos y el Travel Scooter se detendrá bruscamente.

PALANCA ACELERADORA

Con esta palanca podrá controlar la velocidad marcha adelante y atrás del scooter, dentro de los límites fijados por usted con el regulador de velocidad.

- Coloque la mano derecha en el puño derecho del manillar y la izquierda en el izquierdo.
- Con el pulgar derecho, presione la parte derecha de la palanca para desactivar los frenos del Travel Scooter y empezar a avanzar.
- Suelte la palanca hasta que el scooter se detenga completamente, y pulse la parte izquierda de la palanca para dar marcha atrás.
- Al soltar el acelerador, éste vuelve automáticamente a la posición central de "stop", activando los frenos del Travel Scooter.

Claxon

Activa el claxon de advertencia. El claxon sólo funcionará con el Travel Scooter encendido. No dude en utilizar el claxon como señal de advertencia ante cualquier riesgo de accidente o lesión.

V. SU TRAVEL SCOOTER

REGULADOR DE VELOCIDAD

Esta ruedecilla permite preseleccionar y limitar la velocidad máxima del scooter.

- La imagen de la tortuga representa el valor de velocidad mínimo.
- La imagen de la liebre representa el valor de velocidad máximo.

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

Cuando la llave está introducida totalmente en la cerradura de contacto, este indicador muestra el nivel aproximado de las baterías. Para obtener más información sobre el indicador de batería, consulte VI, “Baterías y su carga”.

SECCIÓN POSTERIOR

La palanca del modo manual, las ruedas antivuelco y el conjunto motor/transeje están situados en la sección posterior de su scooter (fig. 6).



¡ADVERTENCIA! Antes de activar o desactivar el modo manual de su Travel Scooter, quite la llave de la cerradura de contacto. No se sienta nunca en un scooter que esté en modo manual. No utilice nunca el modo manual en pendientes.

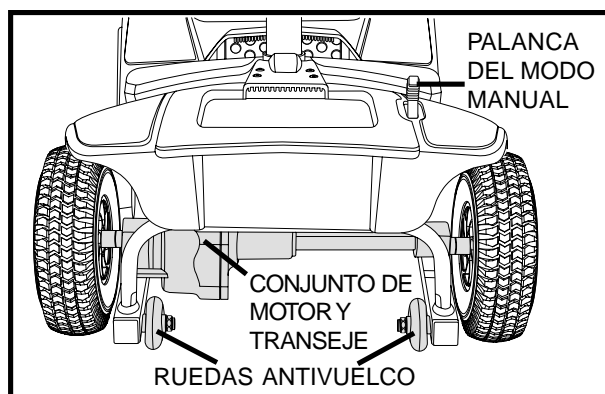


Figura 6. Sección posterior

PALANCA DEL MODO MANUAL

Utilice el modo manual cuando necesite o quiera empujar su Travel Scooter a lo largo de distancias cortas. La palanca del modo manual está ubicada en la parte superior dcha. de la sección posterior.

1. Presione la palanca hacia delante para deshabilitar el sistema de conducción y frenado. Ya puede empujar su Travel Scooter.
2. Presione la palanca hacia atrás para volver a habilitar el sistema de conducción y frenado; desactivará así el modo manual del scooter.



¡ADVERTENCIA! Cuando el Travel Scooter está en modo manual, el sistema de frenado permanece inactivo.

- Desactive los motores sólo en superficies llanas.
- Asegúrese de sacar la llave de la cerradura de contacto.
- Sitúese detrás o a un lado del Travel Scooter para activar y desactivar el modo manual. Nunca lo haga sentado en el scooter.
- Cuando haya terminado de empujar el scooter, vuelva siempre al modo conducción para bloquear los frenos.

En caso contrario, podría provocar lesiones o daños materiales en su Travel Scooter.

RUEDAS ANTIVUELCO

Las ruedas antivuelco son parte integrante de la seguridad de su scooter. Bajo ninguna circunstancia retire las ruedas antivuelco del Travel Scooter.



¡PROHIBIDO! Salvo autorización de Pride, no retire las ruedas antivuelco ni modifique de ninguna forma su Travel Scooter.

Conjunto de motor y transeje

El conjunto de motor y transeje constituye una unidad electromecánica que convierte la energía eléctrica de las baterías del Travel Scooter en energía mecánica controlada que impulsa las ruedas del scooter.

V. SU TRAVEL SCOOTER

PAQUETE DE BATERIAS

Su Travel Scooter está equipado con un paquete de baterías innovador y fácil de quitar. El asa de la parte superior facilita la extracción del paquete del Travel Scooter con una mano. El paquete contiene dos baterías (12 AH estándar o 17 AH opcionales), la toma de alimentación del cargador, el disyuntor principal (botón de reinicio) y el fusible del paquete de baterías (fig. 7).

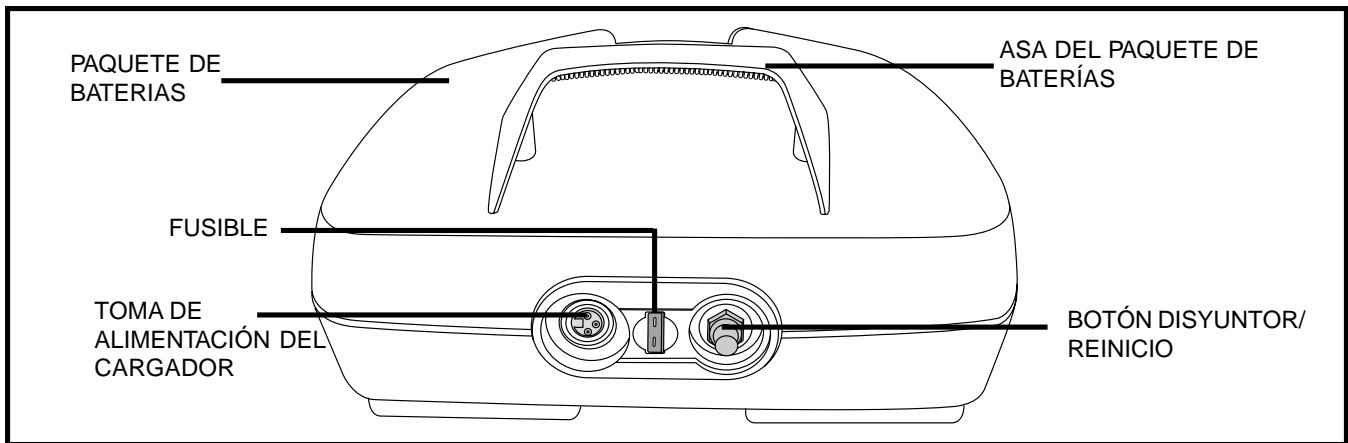


Figura 7. Paquete de baterías (se muestra el paquete 12 AH)

TOMA DE ALIMENTACIÓN DEL CARGADOR

El extremo de 3 contactos del cable del cargador se enchufa en esta toma.

BOTÓN DISYUNTOR/REINICIO

Para evitar daños en el motor y el sistema electrónico, el disyuntor principal puede saltar cuando el voltaje de las baterías del Travel Scooter se vuelve insuficiente o el scooter está demasiado forzado debido a cargas o pendientes excesivas.

- El botón de reinicio salta cuando el disyuntor se activa.
- Así, al activarse el disyuntor, todo el sistema eléctrico del Travel Scooter se apaga.
- Deje “descansar” los componentes electrónicos de su Travel Scooter durante un minuto o dos.
- Apriete el botón de reinicio para restablecer el disyuntor principal.
- Si el disyuntor principal se activa con frecuencia, puede que tenga que cargar las baterías más a menudo. Puede que necesite pedirle a su proveedor autorizado Pride que realice una prueba de carga de las baterías del scooter.
- Si el disyuntor principal interrumpe la corriente regularmente, consulte a su proveedor autorizado Pride.

FUSIBLE DE LA CONSOLA

El fusible situado bajo el paquete de baterías protege el sistema electrónico de la consola (fig. 8). En caso de que algún componente de la consola no respondiera, verifique este fusible. En el Capítulo X, “Resolución de problemas básicos”, encontrará instrucciones sobre el cambio de fusibles.

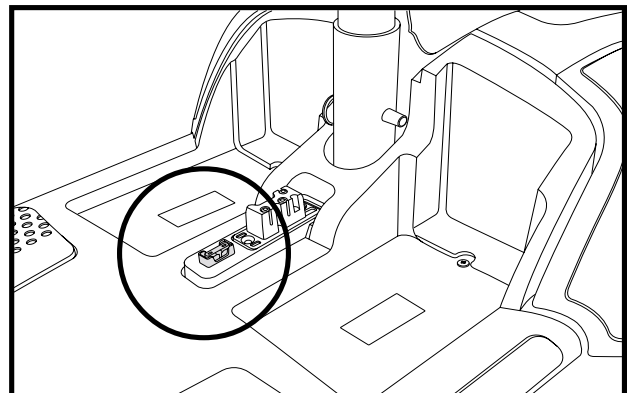


Figura 8. Fusible de la consola de 3 amperios

V. SU TRAVEL SCOOTER

CARGADOR DE BATERÍA EXTERNO

Para cargar las baterías del Travel Scooter, conecte el cargador de batería externo a la toma del cable del cargador (en el paquete de baterías) y a una toma de corriente estándar (fig. 9).

PANELES DE LA CARROCERÍA

Puede cambiar el color de su Travel Scooter reemplazando los paneles de plástico pintados de la carrocería por otros de los disponibles. Los paneles se sujetan mediante un sistema que funciona mediante presiones.

Para quitar los paneles:

1. Localice con el dedo un pequeño orificio detrás de cada pieza.
2. Presione a través del orificio para separar la pieza del Travel Scooter (fig. 10, 11 y 12).

Para quitar la visera de la consola:

1. Tire suavemente de la cima de la visera hacia la parte posterior del scooter para soltarla del sistema de cierre, luego tire con cuidado de los laterales de la visera y levántela de la consola (fig. 13).

Para volver a instalar las piezas de la carrocería, coloque cada una en su lugar y empuje ligeramente hasta que queden bien sujetas.

NOTA: Al colocar los paneles parachoques delantero y trasero, asegúrese de insertar la pestaña, en la parte inferior de cada panel, en su orificio antes de presionar y sujetar el panel (fig. 10).

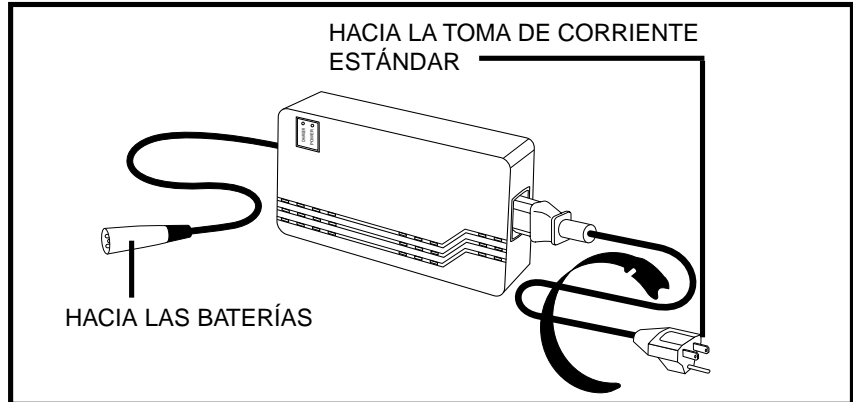


Figura 9. Cargador de batería externo

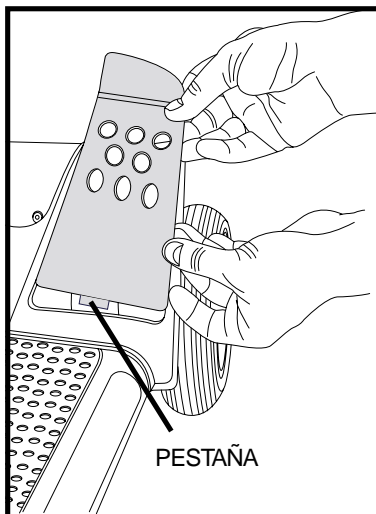


Figura 10. Parachoques frontal

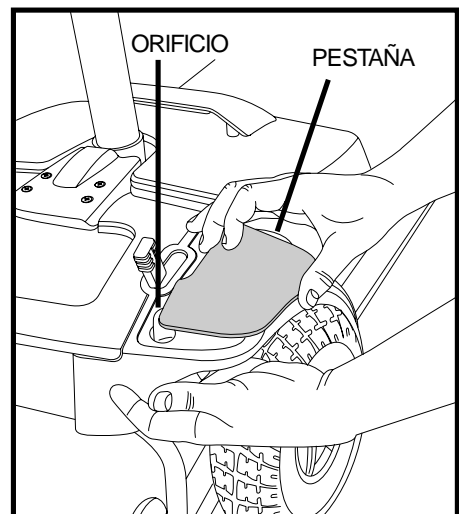


Figura 11. Parachoques trasero

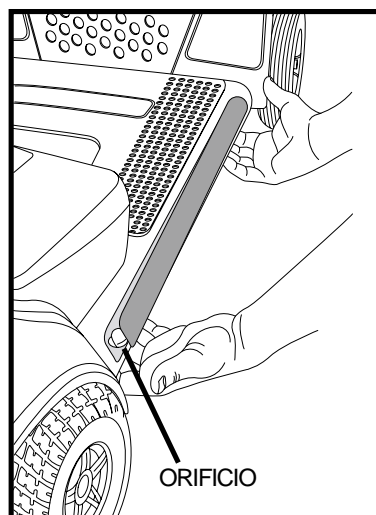


Figura 12. Panel lateral

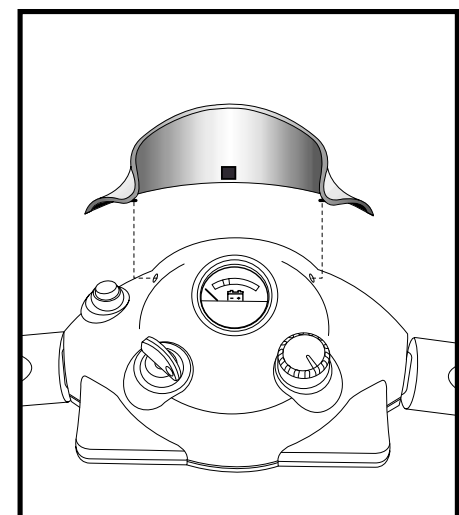


Figura 13. Visera de la consola

VI. BATERÍAS Y SU CARGA

El Travel Scooter utiliza dos baterías de ciclo profundo y larga duración de 12 voltios, selladas y libres de mantenimiento. Se recargan mediante el cargador externo suministrado.

- Cargue las baterías de su Travel Scooter de 8 a 14 horas antes de usarlas por primera vez.
- Para que el Travel Scooter funcione perfectamente, mantenga las baterías totalmente cargadas.

LECTURA DEL VOLTAJE DE LAS BATERÍAS

El indicador de batería de la consola muestra la potencia aproximada de las baterías mediante un código de color. De derecha a izquierda, el verde indica que las baterías están completamente cargadas, el amarillo un vaciado parcial y el rojo advierte sobre la necesidad de recargarlas (fig. 14). Para obtener la mayor precisión, compruebe el indicador de baterías conduciendo el Travel Scooter a velocidad máxima, sobre una superficie plana y seca.

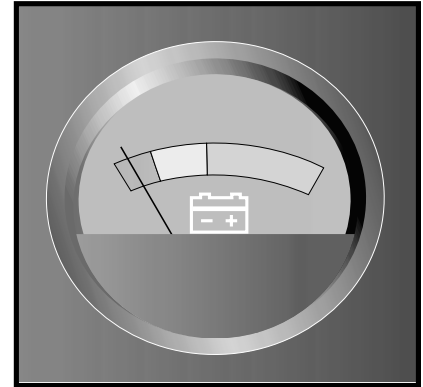


Figura 14. Indicador de Batería

CARGADO DE BATERÍAS



¡PROHIBIDO! No conecte cables de prolongación al cable del cargador de batería, ya que podría provocar un riesgo eléctrico.



¡ADVERTENCIA! No quite el contacto de tierra del enchufe para evitar cualquier riesgo eléctrico. Si su toma de corriente tiene únicamente 2 orificios, instale un adaptador de 3 contactos adecuado. En caso contrario, podría provocar lesiones físicas o daños en el material.

¡ADVERTENCIA! Compruebe que ambos extremos del cable del cargador estén limpios y secos antes de conectarlo al puerto del cargador externo y a la toma de corriente.

¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. Antes de cargar las baterías, lea las instrucciones de carga en este manual y en el manual suministrado con el cargador de batería.

¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. No exponga el cargador externo a la lluvia o a otras fuentes de humedad, a no ser que se permita su utilización en exteriores. Para más información, consulte el manual suministrado con el cargador de batería.



¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. Durante el cargado de baterías se pueden generar gases explosivos. Mantenga su scooter y el cargador alejados de fuentes ignífugas como llamas o chispas y proporcione una ventilación adecuada durante el cargado de baterías.

¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. Antes de cada uso, compruebe el estado de cargador, cables y conectores. Contacte con su proveedor autorizado Pride si encontrara algún daño.

¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. No intente abrir la carcasa del cargador de batería. Si el cargador no funcionara correctamente, contacte con su proveedor autorizado Pride.

¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. Si el cargador de batería externo viene equipado con ranuras de ventilación, no obstruya el paso de dichas ranuras.

¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. Mientras las baterías se cargan, no deje que los niños jueguen cerca del Travel Scooter sin supervisión.

VI. BATERÍAS Y SU CARGA



¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. Salvo que su cargador haya sido probado y aprobado para exteriores, no lo exponga a condiciones ambientales extremas o adversas. Si hubiera sido expuesto a condiciones ambientales extremas o adversas, deberá dejarlo adaptar a las nuevas condiciones en interiores antes de volver a utilizarlo. Para más información, consulte el manual suministrado con el cargador de batería.

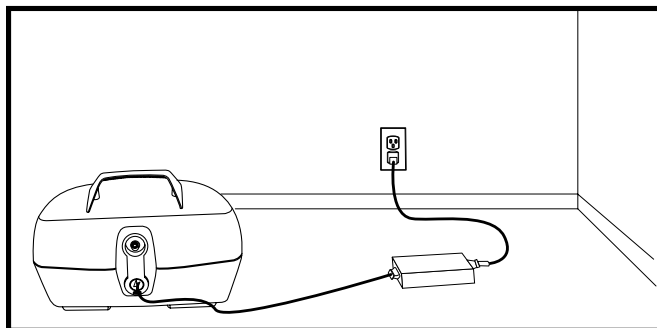


Figura 15. Carga de baterías (paquete de baterías extraído)

Para cargar las baterías de forma segura con el cargador externo:

1. Coloque el scooter cerca de una toma de corriente estándar de pared. (Fig. 15).
2. Saque la llave de la cerradura de contacto.
3. Compruebe que la palanca esté en el modo conducción.
4. Enchufe el cable del cargador a la toma de alimentación del cargador del Travel Scooter, y luego a la toma de corriente de pared. Le recomendamos que deje cargando las baterías durante 8 a 14 horas.

NOTA: Los indicadores LED en el cargador indican los diferentes estados de carga en cada momento. Para saber más sobre estos indicadores, consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador.

5. Cuando las baterías se hayan cargado totalmente, desenchufe el cable de alimentación del cargador de la toma de corriente eléctrica y luego de la toma del scooter.

NOTA: El paquete de baterías puede cargarse dentro o fuera del Travel Scooter.

NOTA: El Travel Scooter dispone de un bloqueador del cargador. Ni el scooter ni el indicador de batería funcionarán mientras se estén cargando las baterías.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (P+F)

¿Cómo funciona el cargador?

Cuando el nivel de voltaje de las baterías es bajo, el cargador trabaja más duro, enviando más corriente eléctrica a las baterías para llenarlas. Cuando están casi totalmente cargadas, el cargador envía cada vez menos corriente eléctrica. Una vez cargadas completamente, la corriente enviada por el cargador baja hasta un amperaje cercano al cero. Por ello, cuando el cargador está enchufado, mantiene el nivel de carga de las baterías de su Travel Scooter, pero sin sobrecargarlas. Sin embargo, no le recomendamos que deje cargando las baterías durante más de 24 horas consecutivas.

¿Por qué no consigo cargar las baterías de mi Travel Scooter?

- Compruebe que el fusible del paquete de baterías esté en buenas condiciones.
- Compruebe que ambos extremos del cable de alimentación del cargador estén bien conectados.

VI. BATERÍAS Y SU CARGA

¿Puedo utilizar otro tipo de cargador?

Los cargadores varían en función de los usos, y están específicamente adaptados al tipo, tamaño y formulación química de unas determinadas baterías. Para conseguir un cargado más eficiente y seguro de las baterías de su scooter, utilice únicamente el cargador suministrado con el equipo original de su producto Pride. Queda prohibido cualquier método de carga en el que se carguen las baterías individualmente.

¿Con qué frecuencia debo recargar las baterías?

Para determinar con qué frecuencia debe cargar las baterías, tenga en cuenta estos dos factores principales:

- Utilización intensiva a diario.
- Uso infrecuente o esporádico.

Teniendo en cuenta esto, podrá determinar con qué frecuencia y durante cuánto tiempo debe cargar las baterías de su Travel Scooter. El cargador de batería está pensado para no sobrecargar las baterías del scooter. No obstante, puede tener problemas si no recarga las baterías con la frecuencia requerida o regularmente. Para obtener un cargado y un funcionamiento seguros y fiables, observe las siguientes consignas.

- Si utiliza el Travel Scooter a diario, recargue las baterías al finalizar el día. Así, estará listo a la mañana siguiente. Si lo utiliza diariamente, le recomendamos que deje cargando las baterías de 8 a 14 horas cada día.
- Si lo utiliza una vez a la semana o menos, cárguelas al menos una vez a la semana durante 12 a 14 horas de cada vez.
- Mantenga las baterías de su Travel Scooter completamente cargadas.
- Evite que se descarguen totalmente.

¿Cómo puedo lograr la máxima vida para mis baterías?

Una batería de ciclo profundo completamente cargada es una garantía de larga vida y alto rendimiento. Siempre que sea posible, mantenga las baterías de su Travel Scooter completamente cargadas. Proteja su scooter y las baterías del calor y el frío extremos. Las baterías que se dejan descargar con frecuencia, no se cargan con regularidad, se guardan bajo temperaturas extremas o antes de haberlas recargado completamente pueden dañarse de forma permanente, afectando al funcionamiento del producto y limitando la vida de las mismas.

¿Cómo puedo obtener el máximo rendimiento por carga?

En general, las situaciones ideales de conducción (terreno liso, plano y firme, sin viento, ni curvas o pendiente) son infrecuentes. En la mayoría de los casos, encontrará pendientes, ranuras en aceras, superficies mal pavimentadas y curvas. Estos factores afectan a la distancia que puede recorrer (la duración de las baterías).

- Antes de usarlas, cargue completamente las baterías.
- Mantenga una presión de **2-2.4 bar (30-35 psi)** en las ruedas neumáticas.
- Planee su trayecto para evitar en lo posible pendientes y superficies blandas o irregulares.
- Limite el equipaje a los artículos imprescindibles.
- Intente mantener una velocidad constante cuando el scooter esté en movimiento.
- Evite avanzar a trompicones.

VI. BATERÍAS Y SU CARGA

¿Qué tipo de baterías debo utilizar?

Le recomendamos las baterías de ciclo profundo que vienen selladas y no necesitan mantenimiento. Tanto las baterías AGM como las de gel son baterías de ciclo profundo, y su rendimiento es similar. No utilice baterías líquidas, con tapas extraíbles. Consulte el cuadro de especificaciones para saber el tamaño, ya que las baterías varían en función del fabricante.



¡ADVERTENCIA! Las baterías están fabricadas con materiales químicos corrosivos. Utilice únicamente baterías de gel o AGM; reducirá así los riesgos de derrame o explosión.

NOTA: Las baterías selladas no requieren mantenimiento. No levante las tapas.

¿Cómo se cambian las baterías de mi scooter?



¡ADVERTENCIA! Evite lesiones y/o daños en el equipamiento. No mezcle baterías viejas y nuevas. Si por cualquier motivo tiene que cambiar una batería, deberá reemplazar ambas. Consulte el cuadro de especificaciones de este manual y del manual suministrado con el cargador para saber el tipo de batería recomendado.

¡ADVERTENCIA! Los bornes y terminales de batería y otros accesorios relacionados contienen compuestos de plomo. Lave las manos tras su manipulación.

1. Extraiga el paquete de baterías del Travel Scooter.
2. Con cuidado, dé la vuelta al paquete.
3. Quite los ocho (8) tornillos del perímetro del paquete de baterías.
4. Con cuidado, vuelva a dar la vuelta al paquete y retire la tapa.
5. Desconecte los cables de batería negro (-) y rojo (+) de los bornes de batería (fig. 16).
6. Extraiga las baterías viejas.
7. Coloque las nuevas baterías en el paquete.
8. Conecte el cable rojo de batería al borne positivo (+).
9. Conecte el cable negro de batería al borne negativo (-).
10. Coloque de nuevo la tapa del paquete de baterías, verificando que todos los cables queden dentro del paquete y no puedan ser pinzados.
11. Con cuidado, dé la vuelta al paquete.
12. Vuelva a colocar todos los tornillos y apriete.

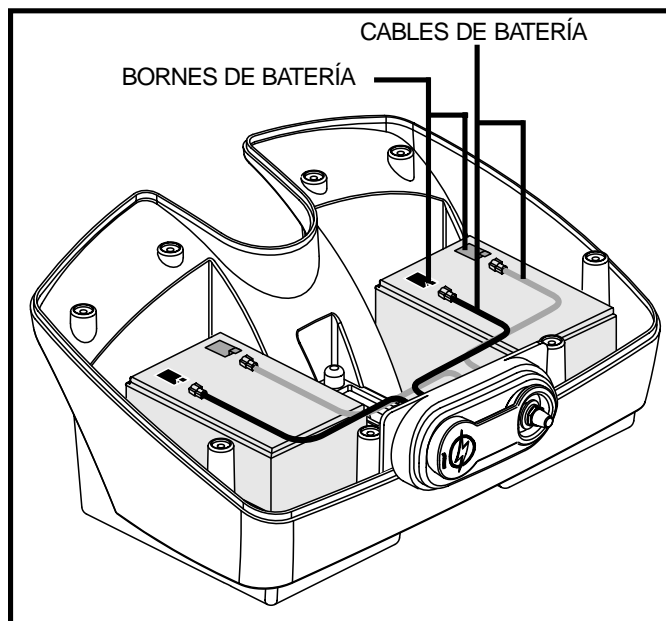


Figura 16. Cambio de baterías (en fig. paquete 12 AH)

VI. BATERÍAS Y SU CARGA

NOTA: En las baterías 17 AH, para desconectar el cable de batería de su borne, deberá quitar el perno y la tuerca correspondientes.

NOTA: Si alguna batería está dañada o agrietada, guárdela inmediatamente en una bolsa plástica y llame a su proveedor autorizado Pride para saber dónde debe tirarla. Su proveedor autorizado Pride dispondrá además de la información necesaria sobre reciclado de baterías, que es lo que nosotros recomendamos.

¿Por qué mis baterías nuevas no rinden al máximo?

Las baterías de ciclo profundo utilizan una tecnología química distinta de las baterías para coches, las de níquel-cadmio u otros tipos de baterías. Las baterías de ciclo profundo están especialmente diseñadas para proporcionar energía, ir agotando su carga y luego permitir una recarga relativamente rápida.

En Pride, trabajamos en estrecha colaboración con el fabricante de nuestras baterías para ofrecerle la batería que mejor se adapta a su silla. Nuevas baterías llegan continuamente a Pride, y son reexpedidas una vez que han sido cargadas. Durante el transporte, las baterías son expuestas a temperaturas extremas que pueden influir en su rendimiento inicial. El calor puede disminuir su carga, y el frío ralentizar la energía disponible y alargar el tiempo necesario para volver a cargar la batería (lo mismo que ocurre en el automóvil).

Serán necesarios unos cuantos días para que la temperatura de las baterías del Travel Scooter se estabilice y adapte a la nueva temperatura ambiente. Por otra parte, deberán pasar varios ciclos de carga (vaciado parcial seguido de recarga completa) antes de lograr el equilibrio químico esencial para obtener el máximo rendimiento y duración de una batería de ciclo profundo.

Siga estos pasos para “rodar” correctamente las nuevas baterías de su Travel Scooter y obtener así la máxima eficacia y duración.

1. Cargue completamente las baterías nuevas antes de utilizarlas por primera vez. Con este ciclo de carga conseguirá que rindan al 88% de su nivel máximo.
2. Maneje su nuevo Travel Scooter por zonas seguras y familiares. Al principio, conduzca despacio y no vaya demasiado lejos de su casa o entornos habituales hasta que no se haya acostumbrado a los controles del scooter y haya rodado correctamente las baterías.
3. Recargue completamente las baterías. Así, conseguirá que rindan a más del 90% de su nivel máximo.
4. Conduzca de nuevo su Travel Scooter.
5. Vuelva a recargar completamente las baterías.
6. Tras cuatro o cinco ciclos de carga, las baterías podrán recibir una carga del 100% de su nivel máximo de rendimiento y durarán más tiempo.

Utilización del transporte público

Si planea usar el transporte público con su Travel Scooter, póngase en contacto antes con la empresa de transporte para conocer sus requisitos específicos.

VII. FUNCIONAMIENTO

ANTES DE MONTAR EN EL TRAVEL SCOOTER

- ¿Ha cargado las baterías completamente? Capítulo VI, “Baterías y su carga”.
- ¿Está la palanca manual en el modo conducción (hacia atrás)? A menos que quiera empujar manualmente su Travel Scooter, nunca deje la palanca manual hacia delante.
- Compruebe que el pomo regulador del manillar esté desbloqueado. Consulte el capítulo IX, “Desmontaje montaje”.

AL MONTAR EN EL TRAVEL SCOOTER

1. Asegúrese de sacar la llave de la cerradura de contacto.



¡ADVERTENCIA! Nunca intente subir o bajar de su Travel Scooter sin antes quitar la llave de la cerradura de contacto. Así, evitará que el scooter se mueva si accidentalmente acciona la palanca aceleradora.

2. Colóquese a un lado del Travel Scooter.
3. Afloje la palanca de bloqueo del asiento y gire éste de forma que quede mirando hacia usted.
4. Compruebe que el asiento esté firme y no se mueva.
5. Siéntese con cuidado y póngase cómodo en el asiento.
6. Afloje la palanca de bloqueo del asiento y gire éste hasta quedar mirando al frente.
7. Compruebe que el asiento esté firme y no se mueva.
8. Asegúrese de que sus pies estén apoyados correctamente en el piso del scooter.

AJUSTES Y CONTROLES PREVIOS

- ¿Está el asiento a la altura adecuada? Consulte el capítulo VIII, “Optimizar el confort”.
- ¿Está el asiento bien sujeto en su sitio?
- ¿El manillar está en una posición cómoda y bien sujeto en su sitio? Capítulo VIII, “Optimizar el confort”.
- ¿La llave está completamente insertada en la cerradura de contacto y girada en sentido horario hacia la posición “on”?
- ¿El claxon de Travel Scooter funciona correctamente?
- ¿El camino por el que va a circular está libre de gente, animales y obstáculos?
- ¿Ha planeado su itinerario para evitar superficies irregulares y todas las pendientes que pueda?

MANEJO DEL TRAVEL SCOOTER

- Seleccione la velocidad máx. deseada con el regulador de velocidad.
- Presione con el pulgar la parte apropiada de la palanca aceleradora.
- El freno de disco electromecánico de estacionamiento se desactiva automáticamente y el scooter acelera suavemente hasta la velocidad preseleccionada con el regulador de velocidad.
- Tire del puño izquierdo para dirigir el Travel Scooter hacia la izquierda.
- Tire del puño derecho para dirigir el Travel Scooter hacia la derecha.
- Mueva el manillar a la posición central para circular todo recto.
- Para detenerse, suelte suavemente la palanca aceleradora. Los frenos electrónicos se activan automáticamente al detenerse el scooter.

NOTA: *La velocidad marcha atrás del Travel Scooter es más lenta que la velocidad hacia delante preseleccionada en el regulador de velocidad.*

VII. FUNCIONAMIENTO

PARA BAJAR DEL TRAVEL SCOOTER

1. Detenga completamente el Travel Scooter.
2. Saque la llave de la cerradura de contacto.
3. Afloje la palanca de bloqueo del asiento y gire éste hasta quedar mirando hacia un lateral del scooter.
4. Compruebe que el asiento esté firme y no se mueva.
5. Con cuidado, bájese del asiento y colóquese a un lado del Travel Scooter.
6. Puede dejar el asiento mirando hacia un lateral para que la próxima vez le sea más fácil subirse al scooter.

TEMPORIZADOR DE DESCONEJÓN

El Travel Scooter está equipado con un temporizador automático de ahorro de energía diseñado para prolongar la autonomía de las baterías del scooter. Si por algún error deja la llave en la cerradura de contacto en la posición “on”, pero no utiliza el Travel Scooter durante uno 20 minutos, el regulador del scooter se apagará automáticamente.

Siga los pasos siguientes para retomar el funcionamiento normal tras la activación del temporizador de desconexión.

1. Saque la llave de la cerradura de contacto.
2. Vuelva a introducir la llave y encienda el Travel Scooter.

VIII. OPTIMIZAR EL CONFORT

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL MANILLAR



¡ADVERTENCIA! Saque la llave de la cerradura de contacto antes de ajustar el manillar o el asiento. Nunca intente ajustar el manillar o el asiento con el Travel Scooter en movimiento.

El scooter dispone de un manillar ajustable y pivotante cuya posición podrá cambiar para su mayor confort.

1. Mientras sujeta el manillar, gire el regulador en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el manillar (fig. 17).
2. Mueva el manillar a la posición deseada.
3. Gire el regulador en sentido horario para bloquear el manillar en la nueva posición.

NOTA: Para poder bajar la caña del manillar al piso del scooter, deberá quitar en primer lugar el asiento y el paquete de baterías. Para quitar el asiento del scooter, tire de él hacia arriba en línea recta.

AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL ASIENTO (ROTACIÓN)

La palanca de rotación, ubicada en el lateral derecho de la base del asiento, ajusta el asiento en varias posiciones.

1. Tire hacia arriba de la palanca de bloqueo para desbloquear el asiento.
2. Gire el asiento hasta la posición deseada.
3. Suelte la palanca de bloqueo para que el asiento recupere su sitio.

ANCHURA DE LOS REPOSABRAZOS

La anchura de los reposabrazos puede reducirse o ampliarse.

1. Afloje los pomos de ajuste de los reposabrazos (fig. 18).
2. Con la anilla, tire y extraiga las arandelas de anclaje.
3. Deslice los brazos hacia el interior o exterior hasta conseguir la anchura deseada.
4. Alinee los orificios de ajuste en la estructura del asiento y los reposabrazos y vuelva a colocar las arandelas de anclaje.
5. Vuelva a apretar los pomos de ajuste.

NOTA: Levante los reposabrazos de forma que pueda subir y bajar más fácilmente del Travel Scooter.

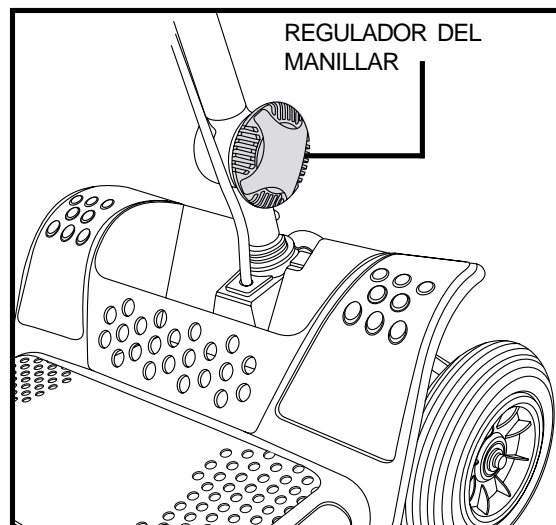


Figura 17. Regulador del manillar

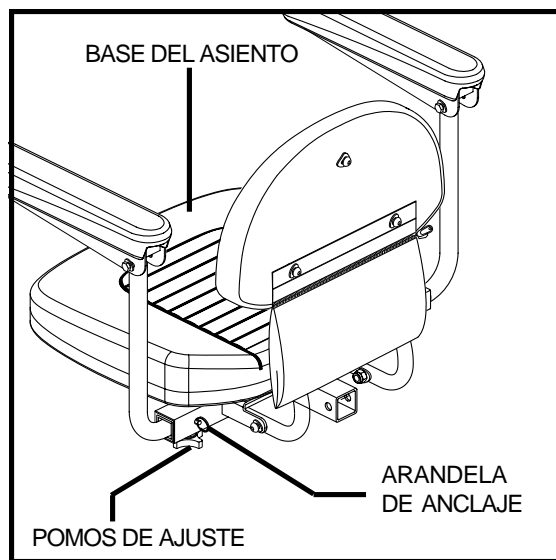


Figura 18. Ajustes en el asiento

VIII. OPTIMIZAR EL CONFORT

AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO

El asiento puede colocarse a diferentes alturas (fig. 19).

1. Extraiga el asiento y el paquete baterías del Travel Scooter.
2. Tire de la anilla para sacar la arandela de anclaje en la parte inferior de la torre del asiento.
3. Suba o baje la parte superior de la torre del asiento hasta lograr la altura deseada.
4. Sujutando la parte superior de la torre a esa altura, haga coincidir los orificios de ajuste en la parte superior e inferior de la torre.
5. Coloque la arandela de anclaje.
6. Coloque de nuevo el paquete de baterías y el asiento.

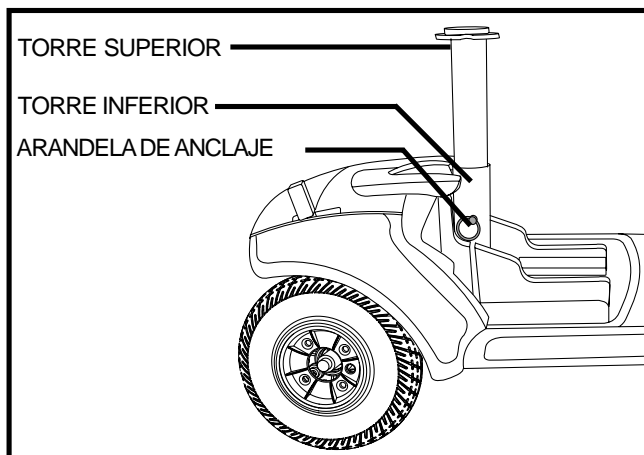


Figura 19. Altura del asiento

ZONA DE ALMACENAMIENTO FRONTAL

El Travel Scooter está equipado con una zona de almacenamiento frontal que puede quitarse si necesita más espacio para las piernas o pies (fig. 20). Quite los tornillos para extraer la pequeña cesta del Travel Scooter.

NOTA: Evite guardar monederos, llaves y otros objetos de valor en esta zona de almacenamiento.

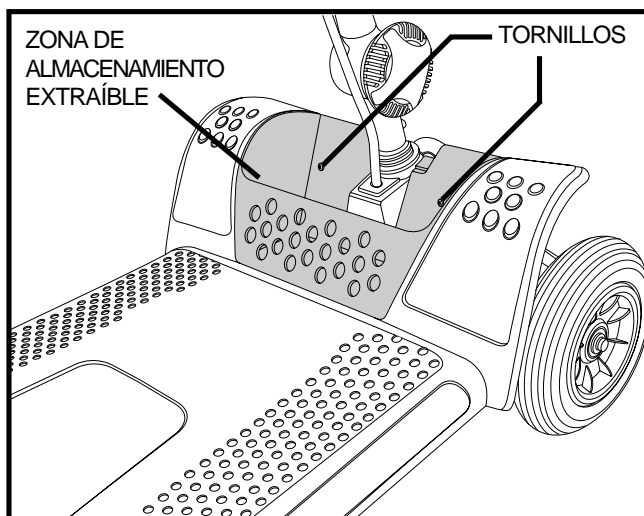


Figura 20. Zona de almacenamiento frontal

IX. DESMONTAJE/MONTAJE

DESMONTAJE

Puede desmontar el scooter en cinco piezas: el asiento, la sección frontal, la posterior y el paquete de baterías (fig. 21). No se necesitan herramientas para montar o desmontar el scooter. Para el montaje o desmontaje, coloque el scooter sobre una superficie plana y seca, y con suficiente espacio para poder trabajar. Recuerde que algunas piezas del Travel Scooter son pesadas y puede que necesite ayuda para levantarlas.



¡ADVERTENCIA! Levantar objetos muy pesados puede provocar lesiones físicas. En caso necesario, pida ayuda para montar o desmontar su Travel Scooter.

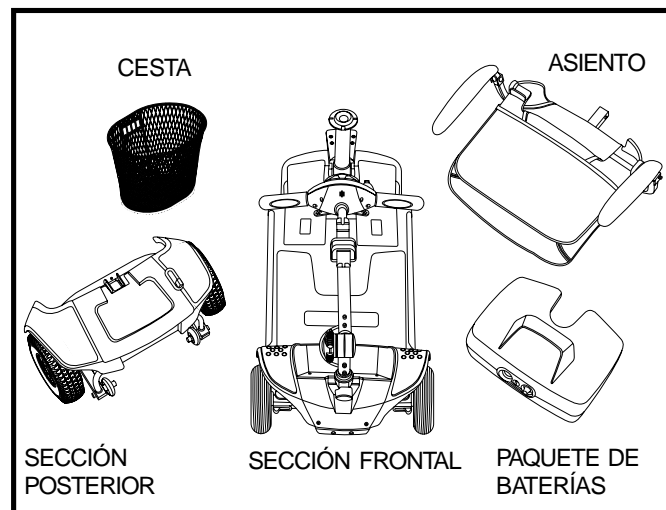


Figura 21. Componentes del scooter

1. Bloquee el manillar en su posición frontal recta apretando el pomo regulador y girándolo 90° en sentido horario (fig. 22). Para poder bloquear el manillar, la rueda frontal debe mirar hacia delante.
2. Para quitar el asiento del scooter, tire de él hacia arriba. Si encuentra alguna resistencia, afloje la palanca de rotación del asiento y gire el asiento adelante y atrás mientras lo levanta.
3. Retire el paquete de baterías.

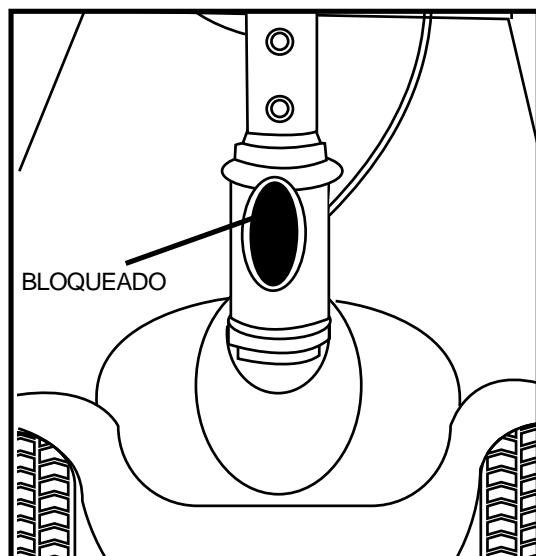


Figura 22. Pomo regulador (bloqueado)

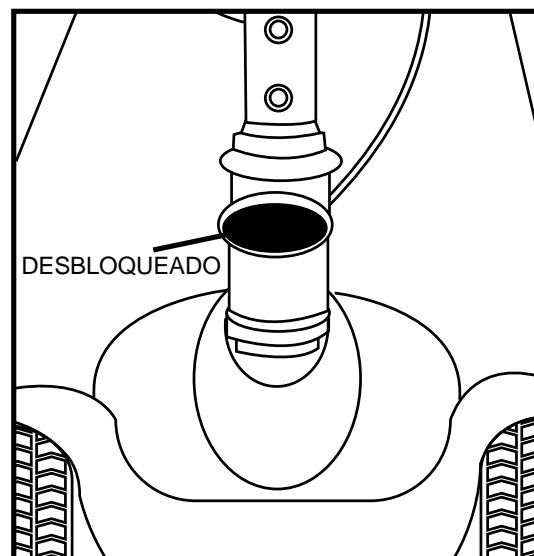


Figura 23. Pomo regulador (desbloqueado)

Separación de la estructura

1. Baje el manillar y apriete el pomo regulador.
2. Levante la palanca de extracción hasta que los enganches de la estructura se desprendan del tubo inferior.
3. Separe con cuidado las dos secciones del Travel Scooter (fig. 24).

IX. DESMONTAJE/MONTAJE

MONTAJE

NOTA: Antes de intentar montarlo, incline ligeramente la mitad posterior del Travel Scooter sobre las ruedas antivuelco, como se muestra en la fig. 24.

1. Utilice la palanca de extracción para levantar la sección frontal a la vez que alinea los enganches de la sección frontal con el tubo inferior de la sección trasera (fig. 24).
2. Una vez colocados los enganches sobre el tubo inferior, baje por completo la sección frontal. Esto bloqueará la estructura.
3. Suba el manillar y apriete completamente el pomo regulador.
4. Vuelva a instalar el paquete de baterías.
5. Coloque el asiento y gírelo hasta que quede bloqueado en su sitio.
6. Destrabe la rueda frontal girando el pomo regulador 90° en sentido contrario a las agujas del reloj (fig. 23).



¡ADVERTENCIA! Tras el montaje y antes de conducir el Travel Scooter, compruebe siempre que el pomo regulador del manillar esté desbloqueado.

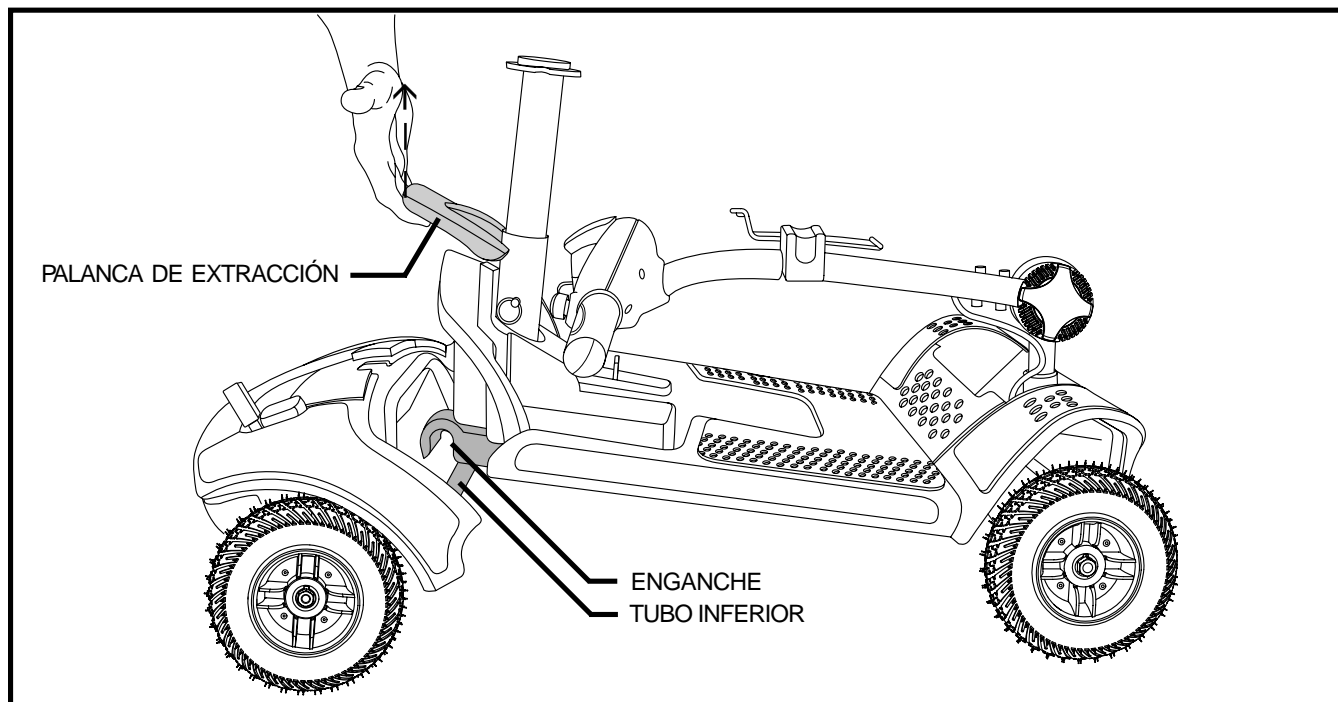


Figura 24. Palanca de extracción

X. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los dispositivos electromecánicos pueden tener a veces pequeños problemas. Sin embargo, la mayoría de ellos pueden resolverse utilizando un poco de lógica y sentido común. Muchos de estos problemas o fallos ocurren porque las baterías no están completamente cargadas o porque están muy gastadas y ya no pueden cargarse.

DIAGNÓSTICO MEDIANTE CÓDIGOS DE SONIDO

Los códigos de sonido de su Travel Scooter están diseñados para ayudarle a resolver de forma rápida y sencilla problemas básicos en su vehículo. Si ocurre alguna de las circunstancias mencionadas a continuación sonará un código de diagnóstico.

NOTA: *El Travel Scooter sólo volverá a funcionar si ha resuelto el problema indicado por el código de sonido y ha apagado y luego encendido el mismo.*

BEEP CODE	PROBLEMA	SOLUCION
■ ■ (2)	El voltaje de las baterías es demasiado bajo para manejar el vehículo.	Recargue las baterías hasta que el indicador de baterías muestre una carga completa.
■ ■ ■ (3)	El voltaje de las baterías es demasiado alto para manejar el vehículo.	Pida ayuda a su proveedor autorizado Pride.
■ ■ ■ ■ ■ (5)	Fallo en el electrofreno. Puede que la palanca manual esté en la posición manual.	Quite la llave y luego ponga la palanca en posición conducción. Reinicie el vehículo.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (6)	Fallo en acelerador. Puede que haya accionado la palanca aceleradora mientras introducía la llave.	Suelte la palanca aceleradora y vuelva a introducir la llave.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7)	Fallo en acelerador. Avería en el potenciómetro del acelerador o la velocidad.	Pida ayuda a su proveedor autorizado Pride.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (8)	El motor del vehículo está desconectado.	Pida ayuda a su proveedor autorizado Pride.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (9)	Posible fallo en el regulador. Puede que tratara de instalar el paquete de baterías con la llave insertada, o el regulador del motor pudo haber activado el modo sobrecalentamiento.	Apaque el vehículo durante varios minutos para que se ventile el regulador. O pruebe introduciendo de nuevo la llave en cerradura de contrato.

Mi scooter no se enciende ni funciona

- Compruebe que la llave esté en la posición “on”.
- Compruebe que las baterías estén completamente cargadas.
- Apriete el botón del disyuntor principal/reinicio.
- Verifique que el paquete de baterías esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que el temporizador de desconexión no haya sido activado. Capítulo VII, “Funcionamiento”.
- Verifique el fusible de la consola situado bajo el paquete de baterías.

Para verificar un fusible:

1. Retire el fusible, extrayéndolo de su ranura.
2. Examine el fusible para comprobar si está fundido (fig. 25 y 26).
3. Coloque un nuevo fusible del tipo y características apropiadas.

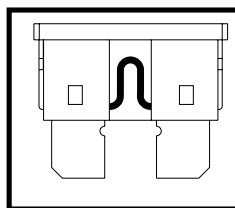


Figura 25. En buen estado

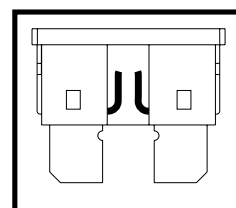


Figura 26. Fundido (cambiarlo)



¡ADVERTENCIA! El nuevo fusible debe ser del mismo tipo y características que el anterior. Si no utilizara un fusible con exactamente las mismas características, podría dañar el sistema eléctrico y provocarse lesiones físicas.

X. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No consigo cargar mis nuevas baterías

- Verifique el fusible situado en el paquete de baterías. Cámbielo en caso necesario.
- Durante el cargado de baterías, si el piloto luminoso nunca llega a indicar una carga completa, verifique el fusible situado en el paquete de baterías. Cámbielo en caso necesario.
- Compruebe que ambos extremos del cable del cargador estén bien conectados (VI, “Baterías y su carga”).
- Si sigue sin poder cargarlas, póngase en contacto con su proveedor autorizado Pride.

¿Qué hago si mi Travel Scooter no se mueve al pulsar la palanca aceleradora?

- Cuando la palanca de modo manual está hacia delante, los frenos están desactivados y la energía no llega al conjunto del motor/transeje.
- Para volver a un funcionamiento normal, empuje hacia atrás la palanca manual, apague el Travel Scooter y luego vuélvalo a encender.

¿Qué hacer si el disyuntor principal salta repetidamente?

- Si el disyuntor principal interrumpe la corriente a menudo, consulte a su proveedor autorizado Pride.
- Cargue las baterías del Travel Scooter con más frecuencia. Capítulo VI, “Baterías y su carga”.
- Si el problema continúa, pídale a su proveedor autorizado Pride que haga una prueba de carga de ambas baterías.
- También puede realizar la prueba usted mismo. Para ello, utilice unos dispositivos de chequeo disponibles en la mayoría de tiendas de automoción y siga las instrucciones del manual correspondiente.
- Consulte el capítulo VI, “Baterías y su carga” o IV, “Especificaciones” para conocer el tipo de baterías de su Travel Scooter.

El indicador de batería cae en picado y el motor hace extraños ruidos cuando pulso la palanca aceleradora

- Cargue completamente las baterías del scooter (VI, “Baterías y su carga”).
- Pídale a su proveedor Pride que haga una prueba de carga de ambas baterías.
- O consulte la pregunta anterior para chequear las baterías usted mismo.

Si encontrara otro problema que no pudiera resolver, póngase en contacto con su proveedor autorizado Pride para obtener la información, el mantenimiento y el servicio necesarios.

XI. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su scooter necesita un cuidado y un mantenimiento mínimos. Si no se siente competente para proporcionar a su scooter los cuidados citados a continuación, pida cita a su proveedor autorizado Pride para que realice un chequeo de inspección y mantenimiento. Deberá realizar revisiones y controles periódicos en las siguientes zonas.

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

- Si cuenta con ruedas neumáticas, mantenga una presión constante de **2-2.4 bar (30-35 psi)**.



¡ADVERTENCIA! Es muy importante mantener en todo momento 2-2.4 bar (30-35 psi) de presión en las ruedas neumáticas. No infle excesivamente ni escasamente las ruedas. Una baja presión neumática puede provocar una pérdida de control, y unos neumáticos demasiado inflados pueden reventar. Si no mantiene constantemente una presión de 2-2.4 bar (30-35 psi) en los neumáticos, se pueden producir pinchazos en la rueda o el neumático, llegando a provocar lesiones graves o daños en su Travel Scooter.

- Inspeccione regularmente el desgaste en las ruedas de su Travel Scooter.

CAMBIO DE RUEDAS

Si su Travel Scooter tiene ruedas neumáticas y ha pinchado, haga reemplazar la cámara. Si, al contrario, está equipado con ruedas macizas, deberá reemplazar la rueda o toda la estructura de la rueda, dependiendo del modelo. Consulte a su proveedor autorizado Pride para obtener más información sobre el cambio de ruedas para su Travel Scooter.



¡ADVERTENCIA! Para evitar cualquier lesión, desinfle el neumático completamente antes de desmontarlo de la llanta o intentar arreglarlo.

¡ADVERTENCIA! Al cambiar un neumático, extraiga sólo la tuerca central de la rueda, y luego retire el neumático. Si necesita desmontarlo más, desinfle el neumático completamente para evitar que explote y le provoque daños personales.

SUPERFICIES EXTERIORES

Aplique ocasionalmente un acondicionador de caucho o vinilo en los parachoques, neumáticos y molduras.



¡ADVERTENCIA! No aplique el acondicionador de caucho o vinilo en el asiento de vinilo del scooter, en el piso o en la rodadura de las ruedas. De lo contrario, la superficie resultante sería muy resbaladiza y podría provocar lesiones o daños en su Travel Scooter.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Utilice un paño húmedo y suave y un limpiador no abrasivo para limpiar las partes plásticas y de metal del Travel Scooter. No use productos que puedan rayar la superficie del Travel Scooter.
- En caso necesario, limpie su producto con un desinfectante apropiado. Antes de aplicarlo, asegúrese de que pueda utilizar el desinfectante en su producto.



¡ADVERTENCIA! Evite las lesiones y los daños en el producto. Siga las consignas de seguridad para la utilización correcta del desinfectante antes de aplicarlo a su producto.

CONEXIONES DE LOS BORNES DE BATERÍA

Asegúrese de que las conexiones de los bornes estén tensas y sin corrosión.

COJINETES DEL EJE Y CONJUNTO MOTOR/TRANSEJE

Estos elementos vienen prelubricados y sellados, y no necesitan más lubricación.

XI. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CABLEADO ELÉCTRICO

- Compruebe regularmente todas las conexiones cableadas.
- Verifique regularmente el aislamiento de los cables, incluido el cable del cargador, para descartar cualquier desgaste o daño.
- Pídale a su proveedor autorizado Pride que repare o cambie los conectores o material aislante dañado antes de volver a utilizar su scooter.

CARROCERÍA DE PLÁSTICO ABS

- Las piezas de la carrocería están formadas por un resistente plástico ABS y revestidas con una fórmula avanzada de pintura de uretano.
- Para que la carrocería conserve su aspecto brillante, utilice un poco de cera para automóviles.

ESCOBILLAS DE MOTOR

Las escobillas de motor están situadas dentro del conjunto de motor y transeje. Su proveedor autorizado Pride deberá revisarlas periódicamente para suplir posibles desgastes.

CONSOLA, CARGADOR/SIST. ELÉCTRICO

- Mantenga siempre estas zonas sin humedad.
- Si alguno de estos componentes se humedeciera, déjelo secar completamente antes de volver a utilizar su scooter.

CAMBIO DE LAS CONTRATUERCAS DE NYLON

Toda contratuerca de nylon que haya sido retirada con motivo del mantenimiento periódico, el montaje o desmontaje del Travel Scooter, deberá ser reemplazada por una nueva. Las contratuercas de nylon no pueden volver a utilizarse ya que se dañaría la inserción de nylon, provocando un ajuste menos seguro. Dispone de contratuercas de nylon de recambio en su ferretería local o puede conseguirlas a través de su proveedor autorizado Pride.

ALMACENAMIENTO

Si planea no utilizar su Travel Scooter por un periodo largo de tiempo, le aconsejamos que:

- . Antes de guardar su scooter, cargue completamente las baterías.
- . Extraiga el paquete de baterías del Travel Scooter.
- Guarde el scooter en un lugar templado y seco. No deje que las baterías se congelen.
- Evite guardar el scooter en lugares sujetos a temperaturas extremas.



¡ADVERTENCIA! Proteja siempre las baterías de temperaturas heladas y nunca cargue una batería congelada, ya que esto dañaría la batería y podría causarle lesiones.

Si va a guardar el scooter durante un largo tiempo, coloque varios cartones bajo la estructura del vehículo para levantarlo del suelo. Así, las ruedas no tienen que soportar todo el peso y se reduce el riesgo de abolladuras en las zonas de los neumáticos en contacto con el suelo.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DEL SCOOTER

Para deshacerse de su scooter deberá tener en cuenta la normativa aplicable en su país. Póngase en contacto con la agencia local de eliminación de residuos o con su proveedor autorizado Pride para saber cómo deshacerse correctamente del paquete, los componentes metálicos y plásticos, el sistema electrónico o las baterías.

XII. GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Durante tres (3) años a partir de la fecha de compra, Pride se compromete a reparar o cambiar, dejándolo a la elección del comprador original y sin cargo alguno, cualquiera de las piezas descritas a continuación, previo examen efectuado por un representante autorizado de Pride que atestigüe que el material presenta un defecto de fábrica:

Componentes que forman la estructura de la silla, incluidos:

- Estructura principal
- Torre del asiento
- Horquilla
- Estructura del manillar

GARANTÍA A PRORRATA DE TRES AÑOS

Garantía a prorrata de tres años, incluyendo:

- Transeje
- Frenos de motor (SÓLO de funcionamiento electrónico)
- Frenos

Estos componentes serán prorrateados como se indica seguidamente:

- Primer año: 100% del costo de piezas recambiadas
- Segundo año: 67% del costo de piezas recambiadas
- Tercer año: 50% del costo de piezas recambiadas

NOTA: No se aplicará la garantía si se produce un aumento en el nivel de ruido de funcionamiento del transeje. Un aumento en el nivel de ruido de funcionamiento suele ser consecuencia de una sobrecarga excesiva o una utilización incorrecta del Travel Scooter.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Durante una (1) año a partir de la fecha de compra, Pride se compromete a reparar o cambiar, dejándolo a la elección del comprador original y sin cargo alguno, cualquiera de las piezas descritas a continuación, previo examen efectuado por un representante autorizado de Pride que atestigüe que el material presenta un defecto de fábrica:

- Cojinetes
- Elementos de goma
- Pasadores
- Elementos plásticos

También, componentes eléctricos, incluidos:

- Reguladores electrónicos
- Cables
- Cargadores
- Cualquier otro subconjunto eléctrico

GARANTÍA DE SEIS MESES

Las baterías están cubiertas por una garantía independiente de 6 meses. Esta garantía es ofrecida por el fabricante de las baterías, no por Pride.

GARANTÍA DE UNIDADES REACONDICIONADAS

Todas las unidades reacondicionadas están cubiertas por una garantía de Pride de seis meses efectiva a partir de la fecha de compra.

XII. GARANTÍA

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre aquellos elementos que necesiten cambiarse debido a su desgaste y deterioro normales.

- Carrocería de plástico ABS
- Escobillas de motor
- Tapicería y asiento
- Zapatas de freno
- Neumáticos y cámaras
- Fusibles/bombillas
- Razones de fuerza mayor
- Gastos laborales, telefónicos, envíos y otros cargos en que se incurra al realizar la reparación del producto, excepto autorización expresa y POR ADELANTADO de Pride Mobility Products Corporation
- Reparaciones o modificaciones efectuadas sin el consentimiento previo de Pride

En las exclusiones también se incluyen componentes dañados por:

- Contaminación
- Utilización incorrecta, accidente o negligencia
- Pérdidas de líquido de la baterías
- Uso comercial u otra utilización indebida
- Manejo, mantenimiento o almacenamiento incorrectos

NOTA: NO está cubierto el deterioro gradual en el rendimiento de las baterías debido a la negligencia del usuario (dejar las baterías descargar completamente, en lugares fríos durante mucho tiempo o por una utilización muy intensa).

SERVICIO DE GARANTÍA Y REVISIONES

El servicio de garantía debe ser realizado por un proveedor autorizado Pride. No envíe piezas averiadas a Pride sin previo consentimiento por escrito. Los costes de transporte y envío en que se incurra al enviar componentes para su reemplazo o reparación correrán a cargo del comprador. Llame a su proveedor autorizado Pride para saber los costes asociados a una revisión

No existe ninguna otra garantía expresa.

NOTAS

NOTAS

NOTAS



Pride
Mobility Products Corp.

**182 Susquehanna Ave.
Exeter, PA 18643-2694**

1-800-800-8586

www.pridemobility.com

I NFMANU3362